

exeol surf

Toutes Surfaces

Détergent désinfectant toutes surfaces

► Solution prête à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces et du mobilier.

- Association synergique originale de deux actifs antimicrobiens (effet SCALE).
- Dès 2 min. (bactéricide, levuricide, virucide sur virus enveloppés).
- Effet de nettoyabilité potentialisé par un surfactant sélectionné pour conférer une faible tension de surface (TS < 27mN/m).
- Adapté aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
- Spray moussant pour un meilleur confort d'utilisation.



Mode d'emploi

▲ exeol surf Toutes Surfaces s'utilise non dilué.

Respecter le plan d'hygiène de l'établissement.

▪ Flacon 750mL spray :

Lors de la première utilisation, détacher la protection d'inviolabilité de la buse.

1. Déverrouiller la sécurité du spray. **2.** Pulvériser uniformément sur la surface de manière à bien couvrir la zone à traiter ($\pm 6\text{mL/m}^2$, à 20-30cm de la surface). **3.** Nettoyer la surface par essuyage. **4.** Temps de contact : dès 2 min. selon le spectre d'activité recherché. Après le temps de contact approprié, laisser sécher ou essuyer avec une lingette sèche. **5.** Ne pas rincer (* excepté les surfaces en contact direct avec la peau ou les denrées alimentaires). Verrouiller la sécurité après utilisation.

Répéter l'opération de désinfection chaque fois que nécessaire.

▪ Bidon 5L :

Le bidon de 5L est conçu pour une utilisation en pulvérisateur à pression préalable.

Lors de la première utilisation, avant de dévisser le bouchon, retirer la bague d'inviolabilité.

1. Dévisser le bouchon du bidon et transvaser le contenu dans le pulvérisateur avant la mise sous pression. Refermer le bouchon du bidon. **2.** Pulvériser uniformément sur la surface de manière à bien couvrir la zone à traiter ($\pm 6\text{mL/m}^2$, à 20-30cm de la surface). **3.** Nettoyer la surface par essuyage. **4.** Temps de contact : dès 2 min. selon le spectre d'activité recherché. Après le temps de contact approprié, laisser sécher ou essuyer avec une lingette sèche. **5.** Ne pas rincer (* excepté les surfaces en contact direct avec la peau ou les denrées alimentaires).

Répéter l'opération de désinfection chaque fois que nécessaire.

Présentations commerciales

- Carton 12 x 750mL : EXP0053
- Carton 2 x 5L : EXP0022

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL




➕ PRODUIT

ACTIF SUR
VIRUS
ENVELOPPÉS

ACTIF DÈS
2 MIN.

SANS
ALCOOL

BONNES PRATIQUES

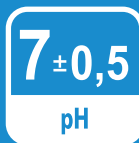

exeol surf

Toutes Surfaces

Détergent désinfectant toutes surfaces

Propriétés microbiologiques

Conditions de saleté, prêt à l'emploi, 20°C :

	ESSAIS	SOUCHES	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide	EN 13727	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</i>	2 min.
	EN 1276	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli</i>	
	EN 16615	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</i>	
Levuricide	EN 13624	<i>Candida albicans, Candida auris</i>	2 min.
	EN 1650	<i>Candida albicans</i>	
	EN 16615	<i>Candida albicans</i>	
Activité virucide contre les virus enveloppés ¹	EN 14476 EN 16777	Virus de la Vaccine ¹ souche <i>Elstree</i>	2 min.
Actif sur Norovirus	EN 14476 EN 16777	Norovirus S-99	15 min.

¹Le Virus de la Vaccine est le virus représentatif des virus enveloppés présentés dans l'Annexe A de la norme EN 14476+A2 et de la norme EN 16777, comme par exemple : Virus de l'hépatite B (VHB) ; Virus de l'hépatite C (VHC) ; Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; Herpesviridae (Herpès virus) ; Coronavirus ; Virus de la grippe, de la rage, de la rubéole, de la rougeole ; ...

Composition	Caractéristiques	Précautions
Préparation liquide biocide TP2/TP4. Substances actives biocides (% m/m) : Chlorure d'alkyl(C12-C16) diméthylbenzylammonium (CAS : 68424-85-1) 0,08% ; Chlorure de didécylidiméthylammonium (CAS : 7173-51-5) 0,16%.	<ul style="list-style-type: none">Etat physique : LiquidepH : 7 ± 0,5Parfum : Non parfuméCouleur : Incolore	Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. UFI : RUS5-N3C9-Y237-06DQ

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

 Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr


UNE DIVISION SODEL