

ENFILE-BAS DOUCEUR

Référence	Désignation
CT05EBD01	Enfile-bas douceur



Atouts :

- Particulièrement recommandé pour les pieds et les peaux fragiles.
- Son tissu bouclette douceur permet d'enfiler facilement les chaussettes et bas en toute souplesse et sécurité.
- Pour chaussettes et bas classiques ou de contention.

Indications :

Pour personne :

- A mobilité réduite.
- Souffrant de maux de dos.
- A la souplesse réduite.
- Souffrant de problèmes articulaires.

Mode d'emploi :

- Recourber l'enfile-bas et l'insérer dans le bas/chaussette.
- Glisser les doigts dans les poignées des lanières.
- Faire descendre l'enfile-bas au sol.
- Mettre son pied dans le bas/chaussette.
- Tirer sur les lanières pour faire remonter le bas/chaussette.

Description :

- Dimensions : 17 x 12 x 30 cm
- Longueur des sangles : 80 cm (dont 16 cm de poignée)
- Poids net : 115 g

Composition :

- Polypropylène chargé de fibres de verre
- Polyester

Entretien :

- Lavage à la main.

Précautions d'emploi :

- Pour des raisons d'hygiène, l'enfile-bas douceur doit être utilisé par une seule personne.
- Tenir éloigné des flammes.
- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 16 x 29 x 16 cm.
- Poids brut : 250 g.