

Manuel de l'Utilisateur

La pince ombilicale de Bahr Le bon usage - Gamme Care Treatment



Les fonctions de la pince Bahr

La pince Bahr ou Bar est un dispositif médical utilisé pour sceller le cordon ombilical du nouveau-né avant de le couper. Il est équipé d'un verrou de sécurité pour éviter toute ouverture accidentelle. Une fois fermée, elle ne peut plus être rouverte.

Remarques :



- Ce dispositif médical doit être manipulé par du personnel formé
- Vérifiez l'intégrité de l'emballage avant utilisation
- Assurez-vous régulièrement que la pince Bahr est en bon état
- Cet appareil est stérile. Pour éviter tout risque d'infection, il est important de respecter le protocole spécial pour l'entretien du cordon mis en place par l'entreprise.

Manuel d'utilisation

1



Positionnement de la pince
Positionner la pince sur le cordon ombilical.
Il est important que le cordon ombilical coïncide avec le centre de la pince

2



Fermeture de la pince
La pince peut être fermée d'une seule main.
Placez vos doigts sur la zone concernée et pressez la pince jusqu'à ce que vous entendiez un clic, ce qui signifie que la pince est verrouillée.

Couper le cordon ombilical Le cordon peut maintenant être coupé en toute sécurité à au moins 6 mm de la pince de Bahr.

3



Section de la pince
Pour couper la pince, il faut la sectionner au niveau de l'anneau avec une pince

Destruction de la pince
Après avoir sectionné la pince, jetez-la avec les autres déchets médicaux qui risquent d'être porteurs d'infection.

Si l'utilisateur souhaite utiliser deux pinces, la littérature spécialisée recommande de les inverser (il faut les placer en opposition, l'une fermée à gauche et l'autre fermée à droite).