



## NOTICE D'INSTRUCTIONS

REF : BEDPRO3

Protection pour Barrière de lit

### IMPORTANT









Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages.

Consulter un médecin avant d'utiliser un dispositif médical. Il vous conseillera et vous informera sur l'utilisation la plus appropriée de ce produit.

Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

### SYMBOLE FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION

	SARL G&C Clinibed 1 – Rue Leuridan-Noclain F 59150 WATTRELOS		Invitation à consulter le manuel d'utilisation
	Date de fabrication Lire étiquette sur le produit		Respecter les consignes de sécurité
	Numéro de lot Lire étiquette sur le produit		Conformité CE
	Référence du produit BEDPRO3		Craint l'humidité

### DESTINATION DU PRODUIT

La protection pour barrière de lit est un dispositif médical de classe I qui complète l'utilisation de la barrière du lit médicalisé. Ce produit est posé sur la barrière par des fixations et protège le patient agité des coups qu'il pourrait donner dans la barrière. Il crée un cocon rassurant pour le patient. Le choix de mettre une protection de barrière de lit incombe à l'équipe pluridisciplinaire de soins. Il est destiné aux patients atteints de pathologie de sénilité afin de compléter leur sécurité. La surveillance du patient est importante pour contrôler son acceptation par le patient.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI



Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.


A chaque utilisation vérifier l'état des coutures et des attaches. Ne pas poser une protection endommagée sur une barrière de lit. Ne pas utiliser si les sangles sont arrachées et les boucles cassées.

Vérifier que la protection est acceptée par le patient et qu'il ne va pas l'enlever. Si le patient tente de l'enlever ne pas l'utiliser et en parler au médecin référent, il pourrait se blesser avec les sangles. Choisir la longueur adaptée à la barrière de lit et au type de lit. Dimension : longueur 130 cm – largeur : 35 cm

### POSE

La pose de la protection de la barrière de lit se fait uniquement par les soignants. La protection pour barrière de lit se contre sur la barrière. Elle s'attache avec les sangles autour de la barrière grâce aux sangles et aux attaches rapides.

A chaque utilisation vérifier l'état des coutures et l'état des sangles et des boucles. On devra vérifier qu'elle est bien ajustée et qu'elle tient bien à la barrière. Si la protection ne tient pas bien et qu'elle n'est pas adaptée aux barrières ne pas l'utiliser.

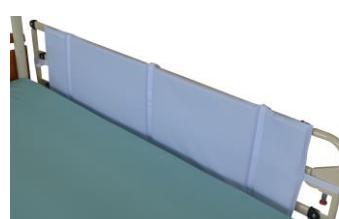

## UTILISATION ENTRETIEN ET MAINTENANCE



L'absence d'entretien et de maintenance de votre produit peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement la protection pour barrière de lit avec un bactéricide non chloré. (Spray, lingette)
- Ne pas utiliser de produit abrasif, de détergent ou de produits chlorés.
- Sécher avec un chiffon doux propre et sec.
- En cas d'usure ou de déchirure, ne pas tenter de réparer la protection : la mettre au rebut ou contacter un revendeur agréé pour savoir si elle peut être prise en charge par le SAV CLINIBED

## CHANGEMENT DE LIT – DE PATIENT

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène et de décontamination. Lors du changement de lit, pensez à remettre la notice au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté pour vérifier son bon état.

## RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter le service en charge de l'élimination de ce type de déchets. Si vous souhaitez effectuer le recyclage pour vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets de vous communiquer ses instructions.

## STOCKAGE



Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

Le produit peut se stocker en 0 et 50 °C. Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.

Respecter les conditions pour ranger et stocker vos produits :

- Dans un endroit sec et tempéré
- Protéger votre produit par un emballage de la poussière
- Ne pas y déposer de charges lourdes.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Assemblage** : par pique fil polyester - coton

**Garnissage** : mousse polyéther 29 kg / M<sup>3</sup> (± 10 %)

**Enveloppe** : 25 % Polyester – 75 % PVC (Cet article contient des biocides selon la norme EU 528/2012 / protection contre la détérioration microbiologique. Active ingrédient : zinc-pyrithione)

**Accessoires** : Boucle poly acétal (POM) – Polyoxyméthylène - Sangle 100% polypropylène

## DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 2 ans en conditions d'utilisation et d'entretien normales. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état.

## GARANTIE

Ce produit est garanti deux ans à partir de la date d'achat par l'utilisateur (justificatif d'achat à fournir). CLINIBED assure le SAV pour tout défaut de couture ou de défauts de matériau. Contactez le distributeur chez qui vous avez acheté le produit au cas où vous auriez besoin de faire une réclamation. Toute réclamation SAV devra faire l'objet d'un retour du produit chez CLINIBED. Le retour se fera aux frais du demandeur. CLINIBED effectuera l'expertise et le diagnostic et l'enregistrement des anomalies dans le cadre du suivi qualité produit post-market selon le règlement UE 2017/745. CLINIBED réalisera la réparation ou le changement de produit s'il y a lieu. Les défaillances résultant de dommages accidentels, d'une mauvaise utilisation, de modifications ou d'une usure ne sont pas couvertes par cette garantie. CLINIBED ne prendra pas en charge le SAV d'un produit détérioré dans le cas d'une utilisation pour un patient inadapté. (Psychiatrie par exemple). Contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit pour appliquer la garantie.



SARL G&C Clinibed- 1, rue Leuridan Noclain -F59150 WATTRELOS

