



VA127CA

Poncho de luxe pour scooter
Instructions d'utilisation et d'entretien

INTRODUCTION

Merci d'avoir décidé d'acheter le poncho de scooter de luxe d'Aidapt.

NB : Il convient d'entreprendre une évaluation des risques pour déterminer si le produit convient à un usage particulier

AVANT UTILISATION

Retirez soigneusement tous les emballages. Évitez d'utiliser des couteaux avec d'autres instruments pointus, car cela pourrait endommager la surface du produit. Vérifiez si le produit présente des dommages visibles si vous constatez des dommages ou si vous soupçonnez une panne, n'utilisez pas votre produit, mais contactez votre fournisseur pour obtenir de l'aide.

UTILISATION PRÉVUE

Ce poncho de scooter de luxe d'Aidapt offre une protection contre les éléments. Il peut être enfilé ou enlevé avec facilité et est doté d'une capuche bien ajustée.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le poncho peut être facilement glissé et mis en place puis ajusté si nécessaire:

- Dézippez complètement l'ouverture du cou et mettez le poncho sur la tête.
- L'ouverture du cou peut être zippée vers le haut ou vers le bas et la capuche peut être relevée et nouée.
- Placez les bras dans les manches en vous assurant que les mains sont complètement exposées.

NB S'assurer que la jupe du produit est dégagée des roues du scooter pour éviter qu'elle ne se retrouve coincée

NB Gardez le poncho à l'écart des pièces mobiles du scooter.

NETTOYAGE

Nettoyez votre poncho de scooter avec un chiffon doux légèrement humide ou uniquement à l'aide d'un détergent doux non abrasif. nettoyants et / ou tampons de nettoyage abrasifs peuvent endommager le produit et ne doivent en aucun cas être utilisés.. Le poncho peut être nettoyé dans une machine à laver à basse température, idéalement sur le programme laine ou délicat. Après le nettoyage, suspendez le poncho de scooter dans un endroit chaud et sec à l'air. Ne le mettez pas en contact direct avec une source de chaleur et ne le mettez pas dans un sèche-linge.

INFORMATION IMPORTANTE

Veuillez faire preuve de bon sens et ne prenez aucun risque inutile lorsque vous utilisez ce produit. En tant qu'utilisateur, vous devez accepter la responsabilité de la sécurité lors de l'utilisation du produit. S'il vous plaît n'hésitez pas à contacter la personne qui vous a remis ce produit ou le fabricant (détaillé ci-dessous) si vous avez des questions concernant l'assemblage / l'utilisation de votre produit.

Aidapt Bathrooms Ltd.

Z.I. les Ports, Nafine, 82800 NEGREPALISSE, France

• Tel: 05 63 48 15 1 • Fax: 05 63 37 61

• Email: Altai.Europe@orange.fr