



FICHE TECHNIQUE

Pack x20, Réf. : ACL 7831738 - Pack x2, Réf. : ACL 9581932

1- Produit

1.1- Description

Protège seau de chaise à liens coulissants muni d'un tampon super-absorbant (capacité d'absorption de 450 ml saline 0,9%).

1.2- Composition

- Sac: PEBD, muni de liens coulissants PEHD bleus. Dimensions : 52x38 cm, 37µ.
- Tampon super-absorbant: Support non-tissé à base de fluff (Cellulose) et de Polymères Super-Absorbants (SAP), 24x13cm pour une capacité d'absorption de 450 ml de solution saline 0,9%.

2- Utilisation

2.1- Mode d'emploi

1. Ouvrir la boîte et enlever le rouleau de protèges-seaux
2. Dérouler le 1^{er} protège-seau et tirer en séparant le long des marques de perforation
3. Ouvrir le sac, le positionner sur le seau, rabattre l'assis de la chaise
4. Le tampon doit être au fond du protège-seau
5. Utiliser le seau garni du protège-seau
6. Attendre que le contenu (+/- 450 ml max) soit transformé en gel en 1 à 2 minutes environ
7. Fermer hermétiquement le sac.

2.2- Élimination

Déchets ménagers ou DASRI si indiqué. Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxine.

2.3- Précautions d'emploi

Produit à usage unique. En cas de contact oculaire rincer abondamment l'oeil et contacter un médecin si nécessaire. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.
Ne pas réutiliser après emploi. Ne pas laisser à la portée des enfants.

3- Réglementaire

3.1 - Conformité

Conforme à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux - Classe I. - CE

3.2- Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot et une date de péremption (5 ans).

3.3- Code douanier

5603149090 (selon la législation européenne en vigueur).

3.4- Sécurité

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

4- Conditionnement

RÉF.	UNITÉ	CARTON	PALETTE
ACL 7831738	Pack de 20 sacs 200x115x115mm 0,74kg	18 packs de 20 sacs (soit 360 sacs) 413x359x366mm 15kg	30 cartons - Soit 540 packs (soit 10800 sacs) 80x120x198cm 465 Kg (palette comprise) 5 étages de 6 cartons
ACL 9581932	Pack de 2 sacs 150x30x100mm 0,1kg	24 pack de 2 sacs (soit 48 sacs) 513x274x121mm 3,7kg	90 cartons - Soit 2160 packs (soit 4320 sacs) 80x120x195cm 348 Kg (palette comprise) 15 étages de 6 cartons

- Brevets, marques, dessins et modèles internationaux déposés
- Dimensions, poids, volume : +/- 5%
- Version 060314



Certifié ISO
9001/13485

CLEANIS S.A.S.
73 rue du Cherche-Midi
75006 PARIS - FRANCE

CLEANIS Inc.
1375 Broadway avenue
NY 10018 - USA

Cleanis K.K.
Tokyo Trade Center
Tokyo 105-0022 - JAPAN

Web :
www.cleanis.com