

Tondeuse Chirurgicale avec lame à usage unique



FICHE TECHNIQUE

Description

La tondeuse est un appareil rechargeable conçu pour être utilisé avec des lames uniques.
La tonte peut s'effectuer sur peau sèche ou humide



Lame Général



Lame Neuro



Lame SensiClip™

Caractéristiques générales

- **Tondeuse**
- **Chargeur adaptateur**
- **Lame à usage unique :**
 - **Lame Général** : Conçue pour tous type de poils. Recommandée pour la chirurgie générale, la cardiologie et l'orthopédie.
 - **Lame Neuro** : Conçue pour es cheveux et autres poils très épais. Recommandée pour la neurochirurgie.
 - **Lame SensiClip™**: Conçue pour la dépilation dans la zone de l'aine et du périnée. Recommandée pour l'urologie, l'obstétrique et la gynécologie.

Informations d'utilisation

- **Temps de charge:** 17 heures
- **Type de batterie:** Lithium-Ion sans mémoire
- **Immersion :** Ne pas dépasser une immersion de plus de 30 minutes à un maximum de 1 mètre de profondeur
- **Désinfection :** Débrancher le chargeur avant le nettoyage. Passer la tondeuse sous l'eau courante pour enlever les cheveux coupés et les autres contaminants apparents. Faire tremper la tondeuse dans un désinfectant approuvé. Sécher la tondeuse avec une serviette propre. Remettre la tondeuse soit sur son chargeur, soit dans un rangement. Si nécessaire, nettoyer le chargeur avec un désinfectant approuvé. Les désinfectants contenant de l'alcool benzylique peuvent provoquer des dommages chimiques sur le boîtier extérieur et ne doivent donc pas être utilisés pour le nettoyage de routine. Si c'est le cas, la période de garantie mentionnée pour ce produit sera annulée. Les lames sont à usage unique exclusivement. La réutilisation des lames peut empêcher le produit de fonctionner ou provoquer une contamination croisée.

Conseils d'utilisation

La tondeuse chirurgicale ne doit être utilisée que par du personnel de santé formé :

- La peau du patient doit être propre.
- Tondre à sec ou sur peau humide.
- Choisir la lame qui convient en fonction de la zone à tondre.
- Fixer la lame.
- Mettre la tondeuse en marche.
- Vérifier qu'il n'y a pas de vibration ni de bruit anormal.
- Tenir la tondeuse, logo vers le haut, à un angle de 40° environ par rapport au patient, (tenir entre le pouce et l'index, avec la main au-dessous, comme lorsque l'on utilise un stylo ou un crayon, ou avec une prise par-dessus standard).
- Faire glisser la face de la lame sur la surface de la peau. Pour de meilleurs résultats, aller à rebrousse-poil. Pour les zones difficiles, tendre la peau pour la tondre.
- Une fois la tonte achevée, éteindre la tondeuse.
- Retirer la lame et la jeter dans le réceptacle qui convient.
- Désinfecter la tondeuse après chaque utilisation.

Précautions

- La tondeuse Réf.5513E doit être utilisée avec un chargeur de série Réf.5514.
- Ne pas immerger la tondeuse dans l'eau à plus d'un mètre de profondeur pendant plus de 30 minutes.
- Tenir le chargeur loin de l'eau – ne pas brancher avec les mains mouillées.
- Tenir le cordon de raccordement du chargeur loin de toute surface chaude.
- Ne pas positionner le chargeur à un endroit où il est difficile à brancher.
- Ne pas placer la tondeuse sur le chargeur lorsque vous les porter. Il peut y avoir un risque de chute.
- Ne pas utiliser près d'un anesthésiant inflammable, d'un spray aérosol ou d'appareils administrant de l'oxygène autre que d type nasal ou masque.
- Ne pas exposer à l'eau chaude ou salée, aux solvants organiques ou aux solutions d'eau de Javel.
- Ne pas utiliser d'agents nettoyants à base d'hydrocarbure ou de phénol, ni de nettoyants contenant de l'acétone ou de cétones.
- Ne pas utiliser avec une lampe endommagée.
- Ne pas remplacer le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, retournez-le au fabricant ou à un réparateur agréé pour le faire remplacer, afin d'éviter tout risque.
- Ne pas stériliser.
- Ne pas démonter le boîtier, car cela peut altérer l'étanchéité de l'appareil.
- L'entretien ou la réparation doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié. L'entretien ou la réparation réalisés par du personnel non qualifiés peut créer un risque de blessure, de choc électrique ou d'incendie.
- Hormis pendant le chargement, toujours débrancher le chargeur de la prise immédiatement après usage.
- Ne pas laisser la tondeuse en marche sans l'appliquer sur la peau pendant plus d'une minute avant utilisation. De même, ne pas garder la lame au même endroit de la peau du patient pendant plus d'une minute (cela risque de faire chauffer la lame).

Informations administratives

Lieu de fabrication / Responsable juridique :

Références 4406 / 4412A / 4403A / 5513E : Japon / CareFusion France 309 SAS

Références 5514E : Chine / CareFusion France 309 SAS

Marquage CE : Classe I règle 12 (Directive européenne 93/42/CEE et 2007/47 CE, annexe VII).

Certification : ISO 13485 par le TUV

Code Cladimed: F52A


Température de stockage : -10°C/+60°C

Composition : Sans Latex, sans DEHP ajouté, sans phtalates

Caractéristiques techniques :

Références	Désignation	Indication (exemple)	Zone (conseillée)	Performance Unités coupée par seconde	Autonomie moyenne (mn)	Hauteur de coupe (mm)	Largeur de coupe (mm)	Bruit en fonctionnement (dB)	Composition	Conditionnement (unités)
4406	Lame	Standard	Corps	12 000	120	0,21	31,5	63	Polymère POM / Acier inoxydable	50
4412A	Lame	Neurochirurgie	Cheveux et poils épais	18 000	97	0,55	39,4	63	Polymère ABS / Acier inoxydable	20
4403A	Lame	Urologie Gynécologie Obstétrique	Périnée et toutes zones sensibles	9 800	128	0,23	25,0	65	Polymère ABS & POM / Acier inoxydable	20
5513E	Tondeuse									1
5514E	Chargeur adaptateur									1

 Usage unique

 Durée de vie des lames : 5 ans
Garantie tondeuse : 2 ans