



PHAGO

PHAGO'SURF 2D



Détergent désinfectant pour l'hygiène des sols, des surfaces et du matériel en environnement à risques

CONTACT ALIMENTAIRE



- Large spectre antimicrobien
- Produit combinant détergence et désinfection
- Formulation sans parfum

INDICATION

PHAGO'SURF 2D est un liquide concentré destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, surfaces et matériels en environnement à risques. C'est un nettoyant efficace et un désinfectant à large spectre (bactéricide, levuricide, fongicide, tuberculocide et actif sur virus).

PHAGO'SURF 2D nécessite un rinçage sur les surfaces susceptibles d'entrer en contact direct avec les denrées alimentaires (conformément à l'arrêté du 8 septembre 1999).

COMPOSITION

Chlorure de didécyldiméthylammonium

(N° CAS : 7173-51-5) : 3,5% m/m

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine

(N° CAS : 2372-82-9) : 5,5% m/m

Autres composants : agents de surface non ioniques <5%

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : incolore à jaune

pH à 20°C (produit pur) : 9,1 +/- 0,3

pH à 20°C (produit dilué à 0,25% eau du réseau) : environ 8,0

Densité à 20°C : 1,054 +/- 0,005

TP2 – Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

TP4 – Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

MODE D'EMPLOI

Diluez 1 dose de 20 ml dans 8 L d'eau froide ou tiède du réseau (soit une dilution à 0,25%).

Utilisation en lavage à plat ou en nettoyage humide.

Temps de contact selon le tableau d'activités ci-contre.

Le produit ne doit pas être rincé, sauf en cas de désinfection des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les denrées alimentaires où il doit être rincé à l'eau potable. (Conformément à l'arrêté du 8 septembre 1999 et ses modifications).

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU DOSSIER SCIENTIFIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS ET RAPPORTS DÉTAILLÉS.

ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE

TEMPS D'ACTION

<u>Bactéricide</u>	EN 1276	5 min
	EN 13727+A2	5 min
	EN 1656	15 min
	EN 13697+A1	5 min
	EN 16615	5 min
<u>Levuricide</u>	EN 14349	15 min
	EN 1650 <i>C. albicans</i>	15 min
	EN 13624 <i>C. albicans</i>	15 min
	EN 1657	15 min
<u>Fongicide</u>	EN 13697+A1	15 min
	EN 16615	15 min
	EN 16438	15 min
<u>Mycobactéricide</u>	EN 1657	30 min
	EN 16615	15 min
<u>Virucide contre les virus enveloppés</u>	EN 14348 <i>M. terrae</i>	30 min
	EN 14204	30 min
<u>Virucide contre les virus enveloppés</u>	EN 14476 + A2 <i>Vaccina virus</i>	15 min
	EN 14675 <i>Vaccina virus</i>	15 min
	EN 16777 <i>Vaccina virus</i>	15 min
	EN 17122 <i>Vaccina virus</i>	15 min

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Produit réservé à un usage professionnel. Port des gants conseillé. La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.

Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

RÉFÉRENCES

60424	250 x 20mL doses
60428	4 x 1L One2Dose
60423	2 x 5L
60425	20L

Rev - 05/2023



CHRISTEYNS

MEDICAL CARE

Christeyns France • 31 rue de la Maladrerie • 44120 Vertou • Tél: +33 2 40 80 27 27

www.christeyns.com