



PHAGO

PHAGO'SPRAY DM



Nettoyant et désinfectant pour les surfaces hautes, dans les environnements à risques

CONTACT ALIMENTAIRE



- o Large spectre d'activité
- o Position mousse ou pulvérisation
- o Ne laisse pas de trace au séchage

INDICATION

PHAGO'SPRAY DM est un nettoyant désinfectant professionnel pour la désinfection des surfaces dans les environnements à risques. Il peut être utilisé en pulvérisation sur les murs, les plafonds et le mobilier des services de soins et de chirurgie. Le PHAGO'SPRAY DM peut aussi être utilisé en application sur un linge à usage unique pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.

COMPOSITION

Chlorure de didécylidiméthylammonium (CAS n°7173-51-5; 0,14% m/m) N-(3-aminopropyl)-Ndodécylpropane-1,3-diamine (CAS n°2372-82-9 ; 0,25% m/m)
Éthanol (CAS n°64-17-5 ; 24,00% m/m)
Autre composant : Parfum

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : incolore
Parfum
pH (du produit pur) à 20° C : 9,5 à 11,0
Densité à 20° C : 0,968 ± 0,005

MODE D'EMPLOI

Le PHAGO'SPRAY DM est prêt à l'emploi.
Pulvérisez sur un linge à usage unique et/ou appliquez sur la surface à désinfecter. Ne pas rincer*
Laissez agir 5 minutes pour une activité bactéricide ou 15 minutes pour un spectre complet.

* Dans le cas de désinfection de surfaces pouvant entrer en contact direct avec les denrées alimentaires, un rinçage à l'eau potable est nécessaire (arrêté du 8 septembre 1999 et ses modifications).

ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE

TEMPS D'ACTION

<u>Bactéricide</u>	EN 1276 EN 13727 EN 13697 dont s. <i>typhimurium</i>	15 min* 5 min 5 min
<u>Fongicide</u>	EN 13697 <i>C.albicans</i> EN 13624 <i>C.albicans</i>	15 min 5 min
<u>Virucide</u>	EN 16777 <i>Vaccinia virus</i> Active sur le virus <i>Influenza</i> , <i>HBV</i> , <i>HIV</i> , <i>HCV</i> , <i>virus de l'Herpes</i> , ...) EN 14476 <i>Rotavirus</i>	15 min 15 min 5 min*
<u>Mycobactéricide</u>	EN 14348 <i>M.avium</i>	15 min

*En conditions de propreté

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Attention. La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des flammes nues, des étincelles. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlevez les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

RÉFÉRENCES

60416 6x750mL
60414 2x5L

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU DOSSIER SCIENTIFIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS ET RAPPORTS DÉTAILLÉS.



CHRISTEYNS

MEDICAL CARE

Christeyns France • 31 rue de la Maladrerie • 44120 Vertou • Tél: +33 2 40 80 27 27
www.christeyns.com