



## Compresses hémostatiques stériles Coalgan®

RÉFÉRENCE : COM 7515 COA

■ Gamme Urgence & Accessoires



Gencod : 3401563015536

### DESCRIPTION

- Boite de 5 compresses stériles

### COMPOSITION & PRESENTATION

Fibres d'alginate de calcium (origine végétale)  
Comresse de 5 x 3 cm emballée en sachet individuel, stérilisée par rayonnement  $\beta$   
Information complète sur la notice incluse

### UTILISATION

La comresse est hémostatique, cicatrisante, et est à usage unique

Coalgan® doit toujours être utilisé dans son intégralité, il ne doit pas rester en place + de 24 h, et ne doit pas être réutilisé

Elles sont conseillées pour le traitement des petites coupures, saignements des plaies très vascularisées (arcades), petites plaies diverses, mais également des brûlures superficielles suintantes et doivent être utilisées qu'avec du sérum physiologique pour le pré nettoyage de la plaie (pas de chlorhexidine)

La forme comresse permet de comprimer la plaie et est adaptée aux plaies des muqueuses.

Les retraits sont sans douleur

Dispositifs médicaux de classe II b avec obligation de traçabilité

### INDICATION

Coalgan comresse est indiqué en cas de :



### INTERACTIONS

Coalgan ne doit pas être utilisé avec des solutions alcalines, telles que les solutions d'hypochlorite de sodium, ou contenant de la chlorhexidine, du chlorure de benzalkonium ou des sels de cuivres.

Si de tels produits sont utilisés sur la plaie, rincer abondamment avec une solution de NaCl à 0.9% avant d'appliquer Coalgan®

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.