



## 1- Produit

- 1.1- Description** Sac vomitoire à doubles cordonnets coulissants, muni d'un tampon super-absorbant (capacité d'absorption de 450 ml saline 0,9%).
- 1.2- Composition**
- Sac: PEBD, muni de doubles cordonnets (bleu et blanc).  
Dimensions : 25x25 cm, 40µ.
  - Tampon super-absorbant: Support non-tissé à base de fluff (Cellulose) et de Polymères Super-Absorbants (SAP), 24x13cm pour une capacité d'absorption de 450 ml de solution saline 0,9%.

## 2- Utilisation

- 2.1- Mode d'emploi**
1. Ouvrir la boîte et prendre un sac
  2. Déplier le sac, l'ouvrir, et le tenir avec les mains
  3. Vomir dans le sac
  4. Attendre que le contenu (+/- 450 ml max) soit transformé en gel en 1 à 2 minutes environ
  5. Pour fermer, tirer les cordonnets de chaque côté du sac, c'est-à-dire bleu sur un côté, blanc de l'autre; nouer.
- 2.2- Élimination** Déchets ménagers ou DASRI si indiqué. Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxine.
- 2.3- Précautions d'emploi :** Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi. En cas de contact oculaire rincer abondamment l'oeil et contacter un médecin si nécessaire. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Ne pas laisser à portée des enfants.

## 3- Réglementaire

- 3.1 - Conformité** Conforme à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux - Classe I.- CE
- 3.2- Identification** Chaque produit est identifié par un numéro de lot et une date de péremption (5 ans).
- 3.3- Code douanier** 5603149090 (selon la législation européenne en vigueur).
- 3.4- Sécurité** Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

## 4- Conditionnement

RÉF.	UNITÉ	CARTON	PALETTE
ACL 7733987	Pack de 20 sacs 250x50x150mm 0,49kg	21 packs de 20 sacs (soit 420 sacs) 764x368x169mm 12kg	33 cartons - soit 693 packs (soit 13860 sacs) 80x120x196cm 410kg (palette comprise) 11 étages de 3 cartons

- Brevets, marques, dessins et modèles internationaux déposés
- Dimensions, poids, volume : +/- 5%
- Version 060314

Certifié ISO  
9001/13485**CLEANIS S.A.S.**  
73 rue du Cherche-Midi  
75006 PARIS - FRANCE**CLEANIS Inc.**  
1375 Broadway avenue  
NY 10018 - USA**Cleanis K.K.**  
Tokyo Trade Center  
Tokyo 105-0022 - JAPANWeb :  
**www.cleanis.com**