

PG- PAINGONE

Groupe : **PainGone TENS pen**

Sous-groupe :



PainGone Original

CIBLEZ VOTRE DOULEUR:

- * Solution contre les douleurs chroniques et aiguës
- * Prouvé scientifiquement
- * Soulage la douleur rapidement et efficacement
- * Sans médicament
- * Soulagement instantané
- * Sans accoutumance
- * Fonctionne au travers de vêtements légers
- * Utilisation aussi fréquente que nécessaire
- * Petit et léger: facile à transporter partout avec soi

* Fonctionnement manuel:

1. Prenez le Paingone dans votre main
2. Assurez-vous de bien entourer la zone métallique avec votre paume
3. Placez le Paingone en contact avec la zone douloureuse (en cas de maux de tête, placez le sur le bas du cou)
4. Appuyez 40 fois sur le bouton vert
5. Répétez autant de fois que nécessaire

* Contre-indications:

1. Femmes enceintes
2. Personnes portant un pacemaker ou implant électrique
3. Personnes épileptiques
4. Personnes souffrant de problèmes cardiaques

Emballage	Quantité	code EAN	L(mm)	l(mm)	H(mm)	Kg	Garantie (mois):	24
PIECE	1	5060035703869	0	0	0	0	Tarif Douanier:	90189075

Nombre batteries: **No battery**

Batteries Inclus

Alimentation:

