



BOMBE DE FROID FICHE TECHNIQUE

Définition

- Bombe de froid

Caractéristiques générales

- Agit immédiatement en cas de contusions et d'entorses
- Disponible en 150 ml et 400 ml

Instructions d'utilisation

- Vaporiser sur la blessure à une distance de 25 cm pendant au maximum 5 secondes
- Éviter d'appliquer le produit sur des brûlures, des plaies et des muqueuses.



Dispositif médical selon la directive 93/42 CEE modifiée par la directive 2007/47/CE

Mise en œuvre par le D.L. italien n°37 du 25-01-2010

CE 0546

Classe II A

Conformité

- DIRECTIVE CEE 93/42
- Système Assurance qualité : certifié conforme UNI EN ISO 9001:2008.

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS
Composition	Menthol 0.06% Alcool isopropylique 2,06% Myristate d'isopropyle 2% Butane/propane 3,2 bars 95,88%
Validité du produit	5 ans à partir de la date de production indiquée sur l'arrière
Etat microbiologique	Non stérile
Stérile	Non
Présence de latex dans le produit	Non
Présence de latex dans l'emballage	Non
Validité	5 ans
Modalité de conservation	Protéger le produit contre les rayons du soleil et ne pas l'exposer à une température supérieure à 50°C

Élimination

- Selon les normes en vigueur.

Artsana S.p.A. considera le informazioni contenute in questo documento come riservate e non divulgabili. Artsana si riserva univocamente la facoltà di modificare il documento in funzione del progresso tecnico e dello sviluppo normativo relativi al prodotto.



BOMBE DE FROID FICHE TECHNIQUE

Mises en garde

- Ne pas perforer ni brûler après usage
- Conserver à l'abri de toute source de combustion
- Tenir hors de portée des enfants
- Si le temps d'application du produit est dépassé ou si le produit est vaporisé à une distance inférieure, des lésions dues au froid peuvent survenir
- Inflammable
- Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent

Contrôles de qualité

- Chaque lot est soumis aux contrôles selon des procédures codifiées. Les contrôles sont effectués

d'abord sur les matières premières puis durant la phase de fabrication.

Emballage

Les étiquettes et/ou les emballages portent les mentions suivantes :

Nom de vente

Distributeur

Fabricant

Date et lot de fabrication

Validité

Modalité de conservation

Code-barres de l'article

Matériau d'emballage

- Bombe de la marque PiC

Fabricant

Tosvar S.r.l.- via Del Lavoro,10 20060 Pozzo D'Adda (MI) Italy

Distributeur

Artsana S.p.A.- Saldarini Catelli,1 22070 Grandate (Como) Italy.

Assortiment

CODE	CAPACITE	EMBALLAGE	UNITÉ
00 022245 100 000	150 ml	1 pièce	12 pièces
00 022246 000 000	400 ml	1 pièce	6 pièces

ARTSANA S.p.A. La Direzione Tecnica

Dr. MAURO CASSANI
Medical Devices Department
Technical Director

Artsana S.p.A. considera le informazioni contenute in questo documento come riservate e non divulgabili. Artsana si riserva univocamente la facoltà di modificare il documento in funzione del progresso tecnico e dello sviluppo normativo relativi al prodotto.