


Vous avez choisi d'acquérir un produit de DUPONT MEDICAL : le cadre de marche pliant VIENNE ; nous vous en remercions et vous félicitons de ce choix. Nous vous convions à lire ce guide d'utilisation et d'entretien afin de mieux connaître les performances et les qualités de ce cadre de marche.

Mise en garde : La corrélation entre la pathologie du patient et le type de produit à utiliser doit être faite par un professionnel de la santé. Ne pas utiliser le cadre de marche avant d'avoir reçu, de la part du professionnel, une formation et des consignes de sécurité.

AVERTISSEMENT :

- Seuls les patients dont le poids n'excède pas 130 kg peuvent bénéficier de ce cadre de marche.
- L'utilisation du cadre de marche sur un sol irrégulier, de mauvaise qualité, inégal ou en pente est à proscrire absolument sous peine de faire basculer le patient.
- La mise en service doit se faire avec le concours d'une personne habilitée qui procédera aux réglages de l'appareil, adaptés à la morphologie et aux besoins de l'utilisateur.

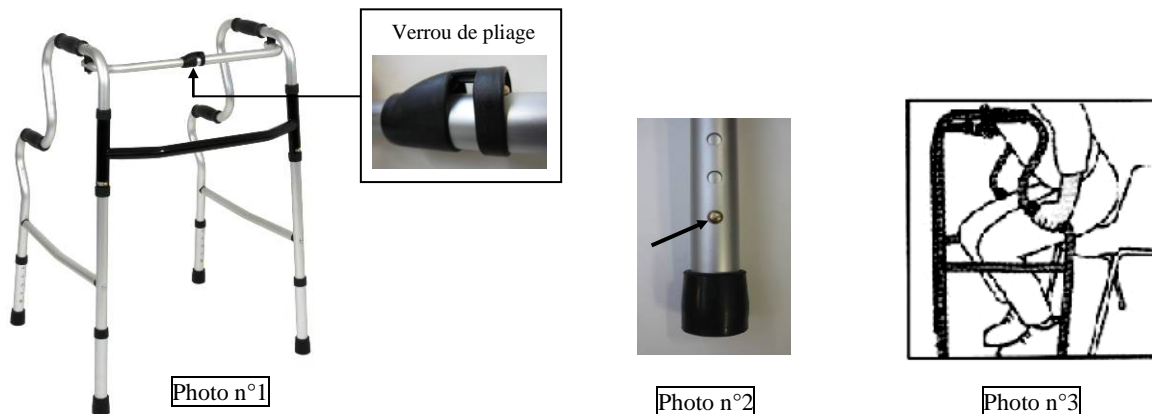

Présentation du produit :

- Le cadre de marche est livré plié entièrement monté. Les poignées sur 2 niveaux permettent d'aider l'utilisateur à se relever (photo n°3).
- Après avoir contrôlé l'état général, vérifier la présence, le serrage et le verrouillage de tous les éléments mécaniques.
- Positionner le cadre sur ses pieds puis écarter l'un après l'autre les deux demi-côtés jusqu'à ce que le verrou de pliage soit entièrement verrouillé. Pour replier le cadre, procéder de manière inverse en appuyant sur le verrou de pliage.
- Régler la hauteur des 4 pieds en appuyant sur les clips (flèche photo n°2) puis ajuster à la longueur souhaitée.

Attention : Les 4 clips doivent tous être positionnés au même niveau de réglage sur les 4 pieds du cadre (photo n°1).

- S'assurer que les clips sont positionnés dans les trous d'indexage, qu'ils sont complètement engagés et que le verrou est enclenché.

IMPORTANT :

- Le professionnel de santé doit s'assurer que le patient a les facultés mentales et physiques suffisantes pour utiliser en toute sécurité le cadre.
- Vérifier la stabilité du cadre de marche et l'efficacité du verrou et des clips de réglage en hauteur avant de le confier au patient.
- Ne jamais tenter de déplacer le cadre ou modifier la hauteur si l'utilisateur est en appui sur celui-ci.
- Ne pas suspendre de poids sur le cadre afin de conserver toute la mobilité et fonctionnalité du produit et éviter tout basculement.

Utilisation :

- Avant d'utiliser le cadre pour la première fois, vérifier que la hauteur des poignées est bien adaptée à la morphologie du patient.
- Le positionner devant soi, tenir fermement les poignées. Lorsque le corps est en équilibre, soulever légèrement le cadre, le déplacer vers l'avant puis le reposer sur le sol. Avancer à l'intérieur du cadre jusqu'à retrouver la position d'équilibre.
- Avant chaque utilisation vérifier la stabilité du cadre de marche et que les 4 clips sont correctement enclenchés.

Entretien régulier :

- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d'un séchage.
 - Vérifier régulièrement l'état des 4 embouts antidérapants, les remplacer dès qu'ils sont dégradés.
 - Vérifier régulièrement l'état des éléments de serrage, des tubes et des poignées. **Ne jamais redresser un tube déformé suite à un choc.**
- Faire vérifier le cadre, au moins une fois par an, par un service technique compétent. Seul un technicien habilité peut procéder à la maintenance et au remplacement de pièces fournies exclusivement par Dupont Médical.**

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors tout (Ixp) : 59 x 53 cm (hauteur mini.) (photo n°1) / 60 x 53 cm (hauteur maxi.)
 Encombrement plié (Ixp x h) : 55,5 x 12 x 80,5 cm (hauteur mini.)
 Hauteur réglable : de 80 à 92,5 cm (poignées) [6 positions - pas = 2,5 cm] Poids : 2,6 kg
 Largeur utile entre poignées : 43 cm (poignées du haut) / 46 cm (poignées du bas) **Poids maximum utilisateur :** = 130 kg
 Couleur : gris métal / Matière : aluminium Diamètre tube : 2,5 cm

Conditions de Garantie :

La structure mécanique est garantie un an. Cette garantie correspond à un emploi normal du produit et exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord de Dupont Médical.
 La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.