



Fiche technique

3M™ Comply™ 1322

Ruban adhésif indicateur d'exposition à la vapeur d'eau

Présentation

Pour ses rubans adhésifs, 3M apporte un soin particulier aux aspects environnementaux :

- ✓ Encre indicatrice d'exposition sans plomb, sans transfert d'encre sur les substrats
- ✓ Procédé de fabrication sans solvant pour la diminution de l'émission de Composés Organiques Volatiles (VOC)
- ✓ Diminution de 30% de la quantité de plastique utilisé pour le conditionnement de ce produit par rapport à la version antérieure.

Ce ruban est un ruban indicateur pour stérilisation à vapeur d'eau. Il ne doit pas être utilisé pour des cycles de stérilisation au peroxyde d'hydrogène, acide peracétique ou par chaleur sèche.

Le ruban 3M Comply 1322 répond aux exigences des normes : ISO 11140-1 classe 1

Ne contient pas de latex naturel.

Fabriqué au Canada

IPD-000513

Mis à jour octobre 2022

3M France
Division Solutions Médicales

1 Parvis de l'Innovation
95006 Cergy Pontoise Cedex Tél.:
01 30 31 61 61

www.3Mfrance.fr/medical

Description

Les rubans 3M Comply 1322 comportent un indicateur d'exposition sensible à la vapeur d'eau.

Selon la norme ISO 11140-1 :2005 cet indicateur d'exposition est de la classe 1.

Prévu pour être utilisé dans les procédés de stérilisation de 121°C à 135°C sur les feuilles de stérilisation servant au conditionnement, il permet de distinguer une charge ou un produit exposé à la vapeur d'eau d'une charge non exposée.


Le ruban est composé d'un papier crêpé enduit.

Avant / Après exposition à la vapeur d'eau :

Références et dimensions

Références	Lx l (m x mm)	Nb par carton
1322V12	55 x 12	42
1322V18	55 x 18	28
1322V24	55 x 24	20

Le délai de péremption est de 18 mois à compter de la date de fabrication dans des conditions normales de stockage (cf notice). Les numéros de lot, dimensions, références et indications réglementaires sont indiqués sur chaque emballage individuel.

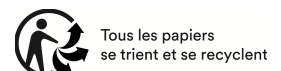

AVERTISSEMENT :

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.