

NOTICE D'UTILISATION :

Canne poignée bois pliante noire et réglable en hauteur (SA1141005)



Lisez attentivement les instructions et mises en garde avant toute utilisation. Conservez cette notice.

L'utilisation de la canne dépend fortement de l'incapacité à marcher. Demandez à un professionnel de santé de vous en expliquer le fonctionnement et d'en effectuer le réglage. Un mauvais réglage peut altérer le fonctionnement de la canne ou engendrer une surcharge pour l'utilisateur. Se conformer aux instructions d'utilisation. En cas de doute, adressez-vous à votre revendeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur (tube)	Noir
Hauteur	83 à 93 cm
Matière	Aluminium
Poids	0,4 kg
Poids maxi.supporté	= 113 kg



INSTRUCTIONS D'UTILISATION :


Comment régler votre canne

- Déplier la canne en emboîtant les segments entre eux.
- Dévisser la bague anti-vibrations ① située en bas de la canne.
- Appuyer sur le bouton poussoir visible à travers l'un des trous de réglage.
- Ajuster la longueur de la canne à la hauteur désirée.
- Positionner le trou en face du bouton poussoir de façon à ce qu'il s'enclenche parfaitement.
- Revisser la bague anti-vibrations ①.



Comment tenir votre canne

- Mettre vos chaussures habituelles.
- Le haut de la canne doit se trouver à la même hauteur que votre hanche.
- Placer la canne à 15 cm devant vous et 15 cm sur le côté. Dans ces conditions, votre avant bras doit former un angle de 20 à 30° par rapport au sol.

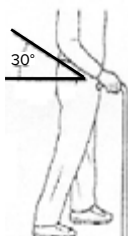

Comment marcher avec votre canne

- Tenir la canne **dans la main opposée à la jambe invalide.**
- Former un triangle d'appui. Placer le pied de la jambe valide en arrière du corps, et le pied de la jambe invalide à l'opposé de la canne pour former un triangle. L'extrémité du pied de la jambe invalide doit être alignée avec la canne.
- Avancer la jambe valide à l'avant du corps en conservant une position triangulaire.



- Avancer ensuite la jambe invalide et la canne en même temps devant le pied de la jambe valide. S'assurer que l'embout de la canne repose et adhère bien sur le sol.
- Faire des petits pas pour garder l'équilibre.

RECOMMANDATIONS / AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LA CANNE :

- Avant chaque utilisation, s'assurer que le bouton poussoir est bien enclenché et que les segments de la canne sont bien emboîtés car risque de chute. Cette action peut entraîner un pincement.
- Etre extrêmement vigilant en cas de sol humide, gelé ou enneigé. Des dalles mouillées peuvent aussi constituer un danger de glissement.
- La canne ne doit pas être utilisée pour supporter des personnes dont le poids est supérieur à 113 kg.
- Vérifier, avant chaque utilisation, que l'embout antidérapant est en bon état et efficace. Ne plus utiliser la canne si elle est endommagée ou déformée car elle ne garantirait plus la stabilité requise.
- Si possible, faire appel à une tierce personne pour emprunter des escaliers.
- Dans la mesure du possible, se faire accompagner et soutenir par une tierce personne afin de prévenir toute chute.

ENTRETIEN RÉGULIER :

- Ne jamais nettoyer la poignée ou l'embout avec des produits gras à base d'huile. Risque de chute !**
- Nettoyer régulièrement la canne à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse tiède suivie d'un séchage (ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou à base d'eau de Javel qui risqueraient d'endommager ou de décolorer le produit).
- Vérifier régulièrement l'état de l'embout antidérapant, le remplacer dès qu'il est dégradé.
- Vérifier la solidité de la canne qui ne doit pas être détériorée, ni présenter de fissure.
- Seules les pièces de rechange fournies exclusivement par Drive DeVilbiss Healthcare France peuvent être utilisées.**

CONDITIONS DE GARANTIE :

La canne est garantie pendant 1 an. Cette garantie correspond à un emploi normal et exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord de Drive DeVilbiss Healthcare France. La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



Importateur : Drive DeVilbiss Healthcare France
Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie - ZAC du Ban la Dame
BP19 - 54390 FROUARD - FRANCE
Tél : 03 83 495 495 - Fax : 03 83 495 496



Zhongshan Bliss Medical Instrument Co. Ltd, No. 98 Zhaoyi Road,
Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province (Chine)



CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/Horacio Lengo 18, CP 29006, Malaga
(Espagne)

drive
DeVilbiss
HEALTHCARE