

	Marque :	Actimove®
	Classe CE :	I, non stérile
	Durée de vie :	2 ans
	Année de mise sur le marché :	2017 en France
	Code CLADIMED :	M50CB02
	Code CND :	/
	Code GMDN :	10668
	Version :	D
	Date :	13/06/2021

DONNEES PRODUIT

Description

Gamme comprenant 3 modèles de bottes de marche, conçues pour stabiliser et protéger la partie inférieure de la jambe, de la cheville et du pied.

Désignation Produit	Version courte et haute	Chausson aéré	Système intégré de valve et de pompe	Coque antérieure
Actimove® Standard Walker	Oui	Oui	Non	Non
Actimove® Standard Air Walker	Oui	Oui	Oui	Non
Actimove® Closed Shell Air Walker / Actimove® Air Walker Fermée	Oui	Oui	Oui	Oui

Caractéristiques

* Communes aux 3 modèles de bottes

- Haute rigidité de l'armature externe pour une grande protection de la jambe, de la cheville et du pied,
- Semelle externe incurvée, favorise la marche naturelle,
- Semelle anti-choc, améliore le confort et sécurise les pas,
- Fermeture à l'aide de 3 ou 5 sangles,
- Rembourrage dense au niveau de la semelle, apporte confort et soutien,
- Rembourrage respirant, pour un meilleur confort.

* Actimove® Standard Air Walker & Actimove® Closed Shell Air Walker

- Système intégré de valve et de pompe, permet un ajustement du niveau de compression pour renforcer le maintien.

* Actimove® Closed Shell Air Walker

- Botte fermée,
- Protection orteils.

Composition

Support : à base de polycaprolactame ou de polypropylène

Chausson : mousse de polyuréthane

Sangles : nylon

Semelle intérieure : copolymères EVA (éthylène-vinyl acétate)

Semelle extérieure : élastomères de synthèse

Contrôles des matières premières et des produits finis

Effectués par le fabricant.

Conditionnement / Stérilisation

Emballage individuel sous sachet plastique avec notice d'utilisation. Produit livré non stérile.

Références

Actimove® Standard Walker

Code EAN13	Code Produit	Code sur l'emballage	Taille	Hauteur	Pointure Homme/Femme		Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809582123	76270-40	76270-30	XS	Courte	< 35,5	< 36	1	16	7112110
4042809582147	76270-41	76270-31	S	Courte	36 – 39,5	36,5 – 38,5	1	16	7112110
4042809582161	76270-42	76270-32	M	Courte	40 - 44	39 – 43	1	16	7112110
4042809582185	76270-43	76270-33	L	Courte	44,5 – 46,5	43,5 – 46	1	16	7112110
4042809582208	76270-44	76270-34	XL	Courte	> 46,5	> 46	1	16	7112110
4042809582222	76270-45	76270-35	XS	Haute	< 35,5	< 36	1	16	7112110
4042809582246	76270-46	76270-36	S	Haute	36 – 39,5	36,5 – 38,5	1	16	7112110
4042809582260	76270-47	76270-37	M	Haute	40 - 44	39 – 43	1	16	7112110
4042809582284	76270-48	76270-38	L	Haute	44,5 – 46,5	43,5 – 46	1	16	7112110
4042809582307	76270-49	76270-39	XL	Haute	> 46,5	> 46	1	16	7112110

Actimove® Standard Air Walker

Code EAN13	Code Produit	Code sur l'emballage	Taille	Hauteur	Pointure Homme/Femme		Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809582321	76272-40	76272-30	XS	Courte	< 35,5	< 36	1	16	7112110
4042809582345	76272-41	76272-31	S	Courte	36 – 39,5	36,5 – 38,5	1	16	7112110
4042809582369	76272-42	76272-32	M	Courte	40 - 44	39 – 43	1	16	7112110
4042809582383	76272-43	76272-33	L	Courte	44,5 – 46,5	43,5 – 46	1	16	7112110
4042809582406	76272-44	76272-34	XL	Courte	> 46,5	> 46	1	16	7112110
4042809582420	76272-45	76270-35	XS	Haute	< 35,5	< 36	1	16	7112110
4042809582444	76272-46	76270-36	S	Haute	36 – 39,5	36,5 – 38,5	1	16	7112110
4042809582468	76272-47	76270-37	M	Haute	40 - 44	39 – 43	1	16	7112110
4042809582482	76272-48	76270-38	L	Haute	44,5 – 46,5	43,5 – 46	1	16	7112110
4042809582505	76272-49	76270-39	XL	Haute	> 46,5	> 46	1	16	7112110

Actimove® Closed Shell Air Walker / Actimove® Air Walker Fermée

Code EAN13	Code Produit	Code sur l'emballage	Taille	Hauteur	Pointure Homme/Femme		Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809582529	76276-20	76276-10	XS	Courte	< 35,5	< 36	1	16	7112110
4042809582543	76276-21	76276-11	S	Courte	36 – 39,5	36,5 – 38,5	1	16	7112110
4042809582567	76276-22	76276-12	M	Courte	40 - 44	39 – 43	1	16	7112110
4042809582581	76276-23	76276-13	L	Courte	44,5 – 46,5	43,5 – 46	1	16	7112110
4042809582604	76276-24	76276-14	XL	Courte	> 46,5	> 46	1	12	7112110
4042809582628	76276-25	76276-15	XS	Haute	< 35,5	< 36	1	12	7112110
4042809582642	76276-26	76276-16	S	Haute	36 – 39,5	36,5 – 38,5	1	12	7112110
4042809582666	76276-27	76276-17	M	Haute	40 - 44	39 – 43	1	12	7112110
4042809582680	76276-28	76276-18	L	Haute	44,5 – 46,5	43,5 – 46	1	12	7112110
4042809582703	76276-29	76276-19	XL	Haute	> 46,5	> 46	1	8	7112110

Actimove® Heel Wedge for Walker - talonnette

Code EAN13	Code Produit	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809582727	76277-94	1	50	

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS

Indications

* Communes aux 3 modèles

- Fractures du pied et de la cheville,
- Lésions des tissus mous du premier tiers distal de la jambe,
- Entorses aiguës de la cheville et du pied,
- En utilisation post-opératoire et au cours de la rééducation,

* Actimove® Standard Air Walker & Actimove® Closed Shell Air Walker

· Système intégré de valve et de pompe, permet un ajustement du niveau de compression, renforce le maintien.

* Actimove® Closed Shell Air Walker

- Botte fermée,
- Protection orteils.

Contre-indications


Fractures instables ou fractures du tibia proximal ou de la fibula.

CONSEILS D'UTILISATION

Mode d'emploi


Actimove® Standard Walker & Actimove® Standard Air Walker

1. Ouvrir les sangles et le chausson sans retirer ce dernier de la botte. Poser la botte à plat sur le sol et enfiler le pied à l'intérieur. S'assurer que le talon repose entièrement contre la partie arrière de la botte.
2. Fermer le chausson sur la jambe en le superposant.
3. Fermer les sangles auto-agrippantes en commençant par celles situées au niveau des orteils.
4. Pour Actimove® Standard Air Walker, contrôler la pression de l'air.
 - Pour insuffler de l'air, faites tourner la valve dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Pour faire évacuer de l'air, tourner la valve dans le sens contraire des aiguilles d'une montre

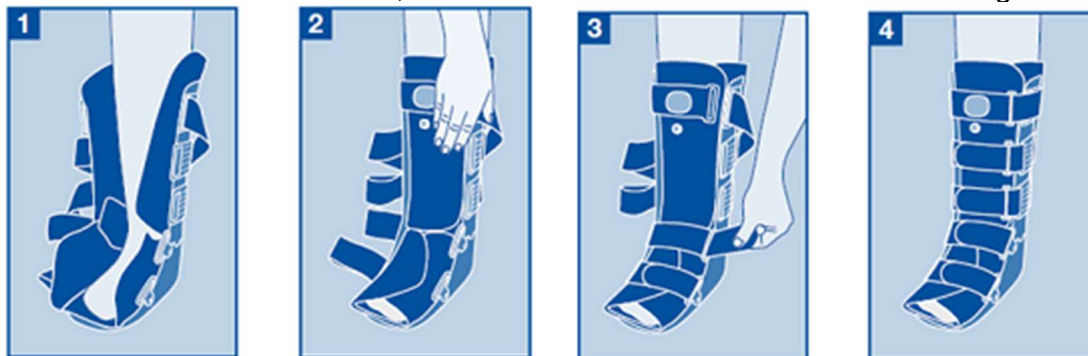

Actimove® Closed Shell Air Walker

1. Ouvrir les sangles et retirer la coque antérieure rigide. Ouvrir le chausson sans le retirer de la botte. Poser la botte à plat sur le sol et enfiler le pied à l'intérieur. S'assurer que le talon repose entièrement contre la partie arrière de la botte.
2. Fermer le chausson sur la jambe en le superposant.
3. Remettre en place la coque antérieure sur le chausson.
4. Fermer les sangles auto-agrippantes en commençant par celles situées au niveau des orteils.
5. Contrôler la pression de l'air.
 - Pour insuffler de l'air, faites tourner la valve dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Pour faire évacuer de l'air, tourner la valve dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

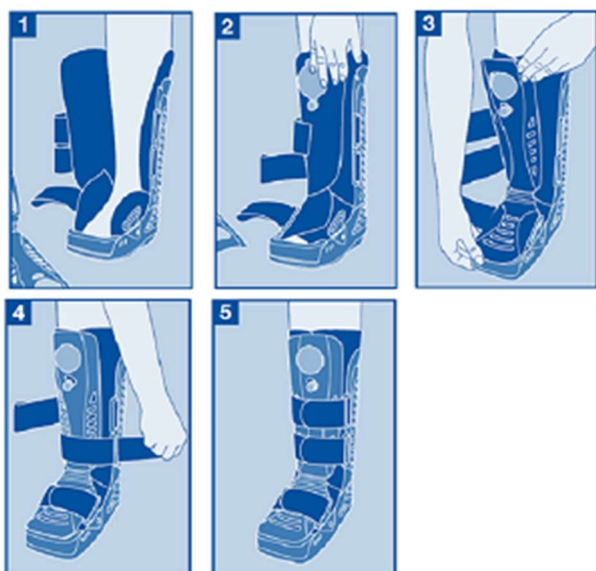

Utilisation de la talonnette

- Au préalable, ajuster si besoin la talonnette en retirant 1 ou plusieurs couches, selon les recommandations du professionnel de santé.
- Placer ensuite la talonnette dans la botte.



Précautions d'emploi

- Se conformer à la prescription et aux recommandations du professionnel de santé.
- En cas d'inconfort, d'engourdissement, d'une modification de la couleur de la peau ou de la formation d'un œdème, contacter immédiatement un médecin.
- Ne retirer la botte que sur recommandation d'un médecin.
- Veiller à réajuster les sangles auto-agrippantes afin que la botte reste stable et confortable.
- A n'utiliser que sur un seul patient.

Accessoires associés

Talonnette Actimove® Heel Wedge pour Walker pour le modèle Closed Shell Air Walker (voir tableau listant les références ci-dessus).

Entretien

Support et sangles lavables à l'aide d'un chiffon humidifié avec de l'eau légèrement savonneuse. Chausson lavable à la main, à l'aide d'un détergent doux. Ne pas le nettoyer à sec. Ne pas utiliser du chlore. Rincer abondamment, puis essorer doucement et le faire sécher à l'air libre. Ne pas l'exposer à la chaleur ou aux rayons du soleil. Ne pas le repasser.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Autorisation de marquage CE

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

Remboursement

Conforme à la LPPR.

Procédés de destruction

Ceux prévus pour la destruction des déchets de soins (incinération contrôlée...) ou mise en décharge, selon la réglementation locale.

Distributeur	Fabricant légal	Mandataire européen
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matéiovigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001	Overland Int'l Corporation Taiwan Branch (Samoa) 10F, No.91, Ln136, Sec. 3, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei, City 23544, Taiwan, R.O.C.	Y. Sung Handelsvertretung Duesselthaler Str. 24 40211 Duesseldorf Allemagne