

	<b>Marque :</b>	<b>Actimove</b>
	<b>Classe CE :</b>	I, non stérile
	<b>Durée de vie :</b>	5 ans
	<b>Année de mise sur le marché :</b>	2020 en France
	<b>Code CLADIMED :</b>	M50CB02
	<b>Code CND :</b>	/
	<b>Code GMDN :</b>	41065
	<b>Version :</b>	C
	<b>Date :</b>	23/05/2021

### DONNEES PRODUIT

#### Description

Orthèse articulée ouverte d'immobilisation du genou, pourvue intérieurement d'un tissu respirant, de 2 baleines latérales et ajustable à l'aide de bandes & sangles auto-agrippantes.

#### Caractéristiques

- Tissu intérieur perforé respirant à séchage rapide. Technologie COOLMAX<sup>®</sup> AIR, évite la macération,
- Fermeture à l'aide de bandes & sangles auto-agrippantes, situées de part et d'autre du genou,
- Baleines comportant de 2 charnières, d'une ouverture allant jusqu'à 180°, apportant une stabilité supplémentaire à l'ensemble lors des mouvements de la jambe,
- Présence de coussinets, pour un meilleur confort,
- Modèle ambidextre,
- Formule sans latex, sans phtalates, sans néoprène.

#### Composition

Polyamide, polyester, élasthanne, copolymère de carboxylbutylbenzène, carbonate de calcium. Polyoxyméthylène (boucle pour sangle), acier inoxydable (baleine).

#### Contrôles des matières premières et des produits finis

Effectués par le fabricant.

#### Conditionnement / Stérilisation

Présentation en boîte unitaire sans notice d'utilisation. Les mesures correspondent à la circonférence de la jambe à mi-cuisse. Produit livré non stérile.

#### Références

Code EAN13	Code Produit	Code sur l'emballage	Taille	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809635461	73118-14	73118-00	XS	30,5 - 35,5 cm	1	12	7113517
4042809635485	73118-15	73118-01	S	35,5 - 40,5 cm	1	12	7113517
4042809637540	73118-16	73118-02	M	40,5 - 46 cm	1	12	7113517
4042809637502	73118-17	73118-03	L	46 - 51 cm	1	12	7113517
4042809636987	73118-18	73118-04	XL	51 - 56 cm	1	12	7113517
4042809637014	73118-19	73118-05	XXL	56 - 61 cm	1	12	7113517
4042809637052	73118-20	73118-06	XXXL	61 - 66 cm	1	12	7113517

**CONDITIONS DE STOCKAGE**

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

**INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS****Indications**

Immobilisation du genou lors :

- . d'une lésion ligamentaire, de type déchirure ou entorse légère à modérée, des ligaments du genou (ligament croisé antérieur LCA ou postérieur LCP, ligament latéral interne LLI ou externe LLE),
- . d'une Lésion de type déchirure partielle du ménisque médial ou latéral,
- . en post-opératoire, à la suite d'une intervention sur le LCA, LCP ou le ménisque,
- . d'une instabilité articulaire au niveau de la Patella (rotule) ou du genou,
- . d'une maladie inflammatoire de type tendinite rotulienne,
- . d'une douleur du genou de type chondromalacie rotulienne, syndrome douloureux avec pression latérale ou de maladie d'Osgood-Schlatter,
- . d'une luxation, latérale ou à la suite d'un défaut d'alignement fémoro-patellaire,
- . d'une ostéoarthrite

**Contre-indications**

Aucune connue.

**CONSEILS D'UTILISATION****Mode d'emploi**

1. Ouvrir l'orthèse et l'envelopper autour du genou en position fléchie afin que la proéminence osseuse se place dans l'ouverture.
2. Fermer la bande auto-agrippante située en dessous du genou, puis celle située au-dessus du genou.
3. Ajuster le maintien en fermant la sangle auto-agrippante située en dessous du genou, puis celle située au-dessus du genou.
4. Pour ajuster le maintien, répéter les opérations 2 et 4.

**Précautions d'emploi**

- . Suivre les conseils du professionnel de santé ayant prescrit ou délivré l'orthèse.
- . Ne pas serrer trop fort les sangles, afin d'éviter d'entraver la circulation sanguine & l'effet garrot.
- . En cas d'inconfort, consulter un médecin.

**Particularité d'utilisation**

- . Veiller à ce que les plaies recouvertes par l'orthèse soient protégées par un pansement approprié.

**Accessoires associés**

Non applicable.

**Entretien**

Retirer les baleines et fermer les bandes et sangles auto-agrippantes. Laver l'orthèse en machine (cycle délicat, température maximale de 40°C) ou à la main à l'aide d'un savon doux. Ne pas utiliser d'eau de javel. Ne pas nettoyer à sec. Rincer à l'eau claire, retirer l'excès d'eau et laisser sécher à plat à température ambiante, loin de toute source de chaleur et à l'abri des rayons du soleil. Ne pas utiliser de sèche-linge. Ne pas repasser. S'assurer que tous les éléments de l'orthèse sont complètement secs avant de reformer l'orthèse et de l'utiliser de nouveau.

## INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

### Autorisation de marquage CE

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

### Remboursement

Conforme à la LPPR.

### Procédés de destruction

Incinération contrôlée ou mise en décharge, selon la réglementation locale en vigueur.

Distributeur	Fabricant légal
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matéiovigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Allemagne Site certifié ISO 13485