

Gamme Arpégia

Ceinture ventrale et Brassière de sécurité

Gamme ARPEGIA : gamme conçue avec les principes fondamentaux du maintien et de l'immobilisation : facilité de mise en place, sécurité dans l'utilisation, confort, rapidité, respect du patient.

Ceinture ventrale

Taille	Dimensions (en cm)*			c**
	a (hauteur)		b	
	18 cm	10 cm		
1	07.1380	07.1480	80	200
2	07.1385	07.1485	100	240
3	07.1390	07.1490	100	280
Pour le lit	07. 1395 -	25 cm	130	250

*Dimensions données à titre indicatif

**Sangle desserrée au maximum




Brassière de sécurité

Taille	Dimensions (en cm)*					
	a (hauteur)		b	c**	d	e**
	18 cm	10 cm				
1	07.1340	07.1440	78	200	35	50
2	07.1345	07.1445	98	240	35	50
3	07.1350	07.1450	98	280	35	100

*Dimensions données à titre indicatif

**Sangle desserrée au maximum

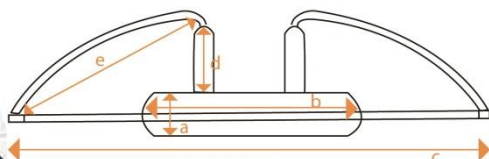

Conseils d'installation :

1. Défaire la boucle et l'attache rapide
2. Placer la ceinture (puis enfiler la brassière)
3. Fixer l'attache rapide à l'arrière du fauteuil ou du lit
4. Régler les sangles suivant la morphologie du patient

Limite d'utilisation : Ne convient pas aux personnes très agitées.

Composition :

- Maille grattée sur mousse Polyuréthane avec envers bouclette
 - Maille grattée : 100% Polyester
 - Mousse : 100% Polyuréthane - 20kg/m³
 - Bouclette : 80% Coton et 20% Polyamide
- Biais : 65% polyester, 35% Coton

Entretien :



Séchage à l'air ambiant préconisé – Fermer les boucles avant le passage en machine.

Avant toute nouvelle utilisation, vérifier l'usure et les éventuels dommages sur les points suivants : tissu, sangle, couture, boucle. Ne pas utiliser un matériel endommagé.

Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.