

# GUIDE D'UTILISATION

Rollator aluminium **ULTRALIGHT** (standard : SA1314001 - XS : SA1314002)



Vous avez choisi d'acquérir un produit de Drive DeVilbiss Healthcare France : le rollator 4 roues ULTRALIGHT ; nous vous remercions de ce choix. Nous vous convions à lire ce guide d'utilisation et d'entretien afin de mieux connaître les performances et les qualités de ce rollator.

**Mise en garde :** La corrélation entre la pathologie du patient et le type de produit à utiliser doit être faite par un professionnel de la santé. Ne pas utiliser le rollator avant d'avoir reçu, de la part du professionnel, une formation et des consignes de sécurité.

## INDICATION :

Convient aux personnes qui ont besoin d'aide à la marche (personnes âgées, handicapées, blessées), fournit un support stable pour un patient ayant un handicap à la marche, un patient gériatrique, obèse ou infirme lorsqu'il se tient debout ou se déplace, et offre un siège sur lequel le patient peut se reposer.

## AVERTISSEMENTS :


- ⚠ - Seuls les patients dont le poids n'excède pas 136 kg peuvent bénéficier de ce rollator.
- L'utilisation sur un sol irrégulier, de mauvaise qualité, inégal ou en pente est à proscrire absolument sous peine de faire basculer le patient.
- La mise en service doit se faire avec le concours d'une personne habilitée qui procédera aux réglages de l'appareil, adaptés à la morphologie et aux besoins de l'utilisateur.

## MISE EN SERVICE :

- Sortir toutes les pièces du carton.
- Déplier le cadre.


● Insérer les roues avant en veillant à positionner **les fourches vers l'extérieur** lorsque le rollator est en mouvement.

Étiquette **R** = côté droit  
Étiquette **L** = côté gauche

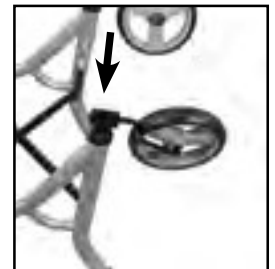

⚠ **Attention :** S'assurer que les 2 boutons poussoirs sont correctement et complètement enclenchés.

- Redresser le cadre et insérer les roues arrière, en s'assurant que **les roues soient positionnées coté extérieur et que les câbles de frein passent à l'extérieur du cadre.**
- Si le patin de frein frotte sur la roue, redémonter l'ensemble et détourner le câble de quelques tours. Le réglage du câble s'effectue au niveau de l'écrou situé à sa base et/ou côté poignée.

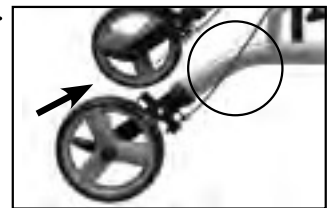

⚠ **Attention :** S'assurer que les 2 boutons poussoirs sont correctement et complètement enclenchés.

## Sangle dorsale :

Positionner la sangle en insérant de chaque côté les fixations dans les glissières des supports situés au niveau des poignées (photo ①).


Ajuster les supports à la hauteur souhaitée.

⚠ **Attention :** S'assurer avant chaque utilisation que la sangle est bien correctement insérée et que les 2 supports sont complètement vissés.

Respecter le sens de montage de la sangle (broderie placée vers l'extérieur).

Ajuster la hauteur des poignées (photo ②) (repères 1 à 5 sur les tubes).

⚠ **Attention :** S'assurer que les 2 poignées sont à la même hauteur (même repère numéroté de chaque côté) et que les 2 boutons de fixation sont correctement et complètement vissés.

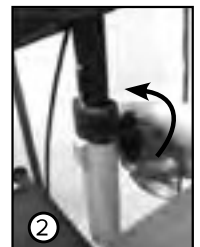

## Ouverture et fermeture :



- Pour déplier le rollator, appuyer de chaque côté du siège jusqu'à entendre un « clic ».
- Pour plier le rollator, tirer sur la sangle située sur l'assise.

⚠ **Attention :** S'assurer que le crochet de blocage situé sous le siège soit correctement et complètement enclenché afin de verrouiller le rollator en position dépliée.



## Réglage des freins :

Lorsque le freinage n'est pas efficace ou trop dur, on peut régler le frein, soit au niveau de la poignée de frein en haut (fig. 1), soit à l'aide d'une clé (non fournie) sur la vis de réglage en bas du câble de frein (fig. 2).

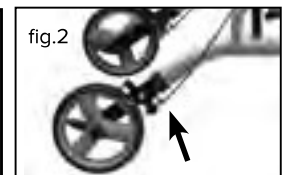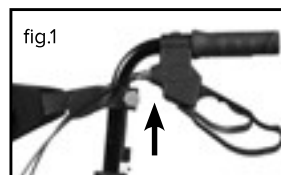


## Utilisation des freins :

Ils sont inopérants quand la poignée est en position horizontale.


- Pour freiner ou ralentir le rollator lors de l'utilisation, tirer les poignées de frein vers le haut (fig.3).
- Pour immobiliser le rollator (frein de parking), pousser les poignées à fond vers le bas jusqu'au « clic » de verrouillage (fig.4).

⚠ **Attention :** les freins de parking doivent toujours être enclenchés avant de s'asseoir sur le siège du rollator.

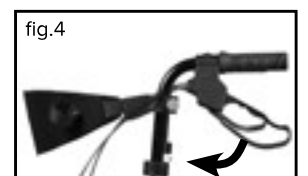

## Sac :

Accrocher le sac sur les supports prévus à cet effet à l'avant du rollator.

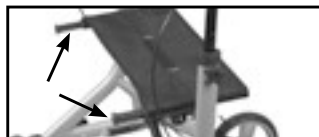

## IMPORTANT :

- Le professionnel de santé doit s'assurer que le patient a les facultés mentales et physiques suffisantes pour utiliser en toute sécurité le rollator.
- Avant de confier le rollator au patient, vérifier la stabilité du cadre, la tenue de la sangle dorsale et de ses 2 supports ainsi que l'efficacité des freins et du verrouillage en position ouverte.
- S'asseoir sur le siège uniquement depuis l'intérieur du rollator et non pas par le devant. Ne pas se mettre debout sur le siège.
- Ne pas mettre trop de poids dans le sac (maximum 5 kg) afin de conserver toute la mobilité et fonctionnalité du rollator et éviter tout basculement.

## UTILISATION :

- Avant d'utiliser le rollator pour la première fois, vérifier que la hauteur de la sangle dorsale et des poignées est bien adaptée.
- Le positionner devant soi, tenir fermement les poignées tout en maintenant les leviers de frein (fig.3). Lorsque le corps est en équilibre, relâcher les leviers de frein, pousser lentement le rollator vers l'avant puis freiner à nouveau (en tirant les leviers de frein vers le haut).

Lorsque le rollator est parfaitement immobilisé, avancer à l'intérieur du cadre jusqu'à retrouver la position d'équilibre.

- Pour une station debout prolongée, immobiliser le rollator en abaissant les poignées de frein vers le bas jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées (fig.4). Pour débloquer les freins, remonter les poignées en position horizontale (fig.3).
- Avant chaque utilisation vérifier la stabilité, le freinage, les fixations de la sangle dorsale et que le rollator est correctement verrouillé en position dépliée.

## ENTRETIEN RÉGULIER :

- Éliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d'un séchage.
- Nettoyage du sac : utiliser de l'eau ou un nettoyant doux.
- Vérifier régulièrement l'état du système de freinage (câbles compris), l'état et la tenue de la sangle dorsale, du siège et des roues ; les remplacer dès qu'ils sont dégradés ou usés.
- Vérifier régulièrement l'état des éléments de serrage, des tubes, des soudures et l'efficacité du freinage.

Seul un technicien habilité peut procéder à la maintenance et au remplacement de pièces fournies exclusivement par Drive DeVilbiss Healthcare France.

## STOCKAGE :









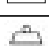
Stocker dans un endroit sec et tempéré.







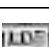

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

POIDS MAXIMUM UTILISATEUR :  = 136 kg

- Dimensions hors tout (Lxpxh) : ...64 x 72 x 83 cm (mini) / 93 cm (maxi)
- Encombrement minimum plié (Lxpxh) : ..... 27 x 72 x 83 cm
- Hauteur poignée réglable de 83 à 93 cm (5 positions - pas = 2,5 cm)
- Largeur entre poignées : ..... 48 cm
- Hauteur siège : ..... standard = 56 cm / XS = 50 cm
- Dimensions siège : ..... 45 x 20 cm
- Diamètre roues (4 dont 2 pivotantes à l'avant) : ..... 20 cm
- Couleurs : ..... bleu ciel, violet, argent, bleu marine, blanc ou noir
- Matière : ..... aluminium, plastique
- Poids : ..... 5,2 kg
- Charge maximale supportée par le sac : ..... 5 kg
- Porte-canne de série.

## SYMBOLES :

	Fabricant
	Représentant autorisé dans l'Union Européenne
	Importateur
	Conformité européenne
	Dispositif Médical
	Référence catalogue
	Code de lot
	Date de fabrication (Année-Mois)
	Charge maximale d'utilisation

	Consulter les instructions d'utilisation
	Produit soumis à une règle de tri
	Sens de stockage
	Matériel recyclable
	Fragile ; manipuler avec soin
	Craint l'humidité
	Limites de température
	Limitation d'humidité

## ÉLIMINATION :

Ce produit est principalement constitué de métal, plastique et caoutchouc. Merci de le recycler. Si vous n'avez plus besoin du produit, contactez s'il vous plaît votre distributeur ou apportez le produit à la déchetterie près de chez vous.

## CONDITIONS DE GARANTIE :

La structure mécanique est garantie un an. Cette garantie correspond à un emploi normal de l'appareil et exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord de Drive DeVilbiss Healthcare France.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final.

Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



Drive DeVilbiss Healthcare France  
Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie - ZAC du Ban la Dame  
BP19 - 54390 FROUARD - FRANCE  
Tél : 03 83 495 495 - www.drivedevilbiss.fr



Ralon Medical Equipment Co., Ltd  
Xilian development zone, Jinsha, Danzao town,  
528222 Foshan, Guangdong - CHINE



Obelis - S.A. - O.E.A.R.C.  
Boulevard Général Wahis, 53  
1030 Bruxelles - BELGIQUE

**drive**  
**DeVilbiss**  
HEALTHCARE