

→ Auscultation polyvalente pour généralistes et pédiatres

RÉCEPTEUR

Double pavillon

En acier inoxydable poli. Le récepteur amplifie les sons sans les déformer. Ergonomique et fonctionnel : prise en main idéale. Conçu pour l'auscultation générale et spécialisée.

Deux modèles :

- 1 Adulte
- 2 Pédiatrique

Membrane acoustique multi fréquences (grand pavillon)

Amplifie, sans les déformer, les sons cardiaques et pulmonaires chez l'adulte et chez l'enfant. Exercer une forte pression sur la peau pour écouter les sons de hautes fréquences (pulmonaires et articulaires). Poser simplement le pavillon sur la peau pour écouter les sons de basses fréquences (vasculaires et cardiaques).

Petit pavillon cloche

Écoute des sons cardiaques et vasculaires.

Bague clipsée anti-froid

Pour le bien-être du patient et un examen en toute sérénité.

3 LYRE ORIENTÉE

Prête à l'utilisation : orientation adaptée à l'angle d'écoute. Confort et écoute optimale.

4 Embouts auriculaires souples à vis

En TPE (Thermo Plastique Elastomère). Grand confort et parfaite étanchéité acoustique. L'écoute n'est pas perturbée par les bruits environnants.

5 Tube simple conduit

En PVC. Couleurs. Excellente transmission et restitution acoustique. Aucun bruit parasite. Les sons physiologiques sont restitués fidèlement.

6 Ressort de lyre intégré

Les ondes sonores sont conduites sans distorsion. L'uniformité de la courbe de réponse est préservée et les sons restitués fidèlement.

5 ANS
GARANTIE







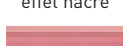


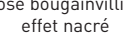


ENTRETIEN
La membrane,
la bague anti-froid,
les embouts
et la tubulure
se nettoient avec
une simple lingette.

La qualité acoustique "Haute Fidélité" Spengler

Tous les pavillons des stéthoscopes de conception Spengler sont équipés d'une membrane acoustique technique en résine époxy "haute résolution" d'une très grande sensibilité pour capter fidèlement et amplifier sans les déformer les sons physiologiques tant en basses qu'en hautes fréquences. Les modèles Magister®, Cardio Sonic® et Cardio Prestige® sont équipés de membranes techniques multi fréquences en résine époxy.

L'isolation du ressort de lyre interne est conçue pour ne pas perturber la propagation des ondes sonores. Les modèles Cardio Sonic® et Cardio Prestige® sont équipés d'un tube double conduit, assurant une écoute en "stéréophonie" de très haute qualité. Spengler vous propose une gamme complète de stéthoscopes, du modèle "cardiologie" au modèle "paramédical" couvrant tous les besoins et toutes les étapes de l'auscultation (cœur, vaisseaux, poumons, abdomen et articulations).

Coloris de tubulures

adultes		pédiatriques
		
noir	vert lagon effet nacré	noir
		
marine	rose bougainvillier effet nacré	bleu azur
		
rouge	gris alizé effet nacré	rose
		
orange		

Caractéristiques techniques

Récepteur	matière	acier inoxydable poli
	dimensions : modèle adulte	grand pavillon : Ø 44,3 mm cloche : Ø 33,3 mm
	modèle pédiatrique	grand pavillon : Ø 34,8 mm cloche : Ø 27 mm
	poids	modèle adulte : 83 g modèle pédiatrique : 56 g
Membrane (grand pavillon)	matière	résine époxy multi fréquences
	dimensions	modèle adulte : Ø 44,3 mm modèle pédiatrique : Ø 34,8 mm
Bague clipsée	matière	PVC
	dimensions : modèle adulte	grand pavillon : Ø 48 mm cloche : Ø 35 mm
	modèle pédiatrique	grand pavillon : Ø 37 mm cloche : Ø 29 mm
Lyre	embouts auriculaires	TPE souple sans latex
	branches	acier inoxydable orientées
	tube simple conduit	monobloc résistant à l'ozone et aux U.V. longueur : 610 mm Ø externe : 8,5 mm Ø interne : 4 mm modèle adulte : noir, marine, rouge, orange, rose bougainvillier, vert lagon et gris alizé modèle pédiatrique : noir, bleu azur et rose
	ressort de lyre interne	acier à élasticité contrôlée
Accessoires	fournis	1 paire d'embouts auriculaires à vis souples en TPE (petite taille) 1 paire d'embouts auriculaires à vis de couleur blanche en PVC
	pièces de rechange	paire d'embouts auriculaires à vis souples noirs bague anti-froid noire ou grise membrane multi fréquences
Longueur totale		Adulte : 790 mm Pédiatrique : 780 mm
Dimensions (boîte)		327 x 167 x 47 mm (L x l x h)
Poids total (boîte)		modèle adulte : 390 g modèle pédiatrique : 360 g
GARANTIE SPENGLER (dans les conditions normales d'utilisation)		<ul style="list-style-type: none"> récepteur et lyre : 5 ans embouts auriculaires, membrane et bagues anti-froid : 1 an. à vie contre tout défaut et vice de fabrication caché

Références	Modèles adultes	Références	Modèles pédiatriques
507 200	Magister®, tubulure noire	507 210	Magister®, tubulure noire
507 202	Magister®, tubulure marine	507 214	Magister®, tubulure bleu azur
507 201	Magister®, tubulure rouge	507 217	Magister®, tubulure rose
507 204	Magister®, tubulure gris alizé (nacré)		
507 205	Magister®, tubulure rose bougainvillier (nacré)		
507 208	Magister®, tubulure orange		
507 209	Magister®, tubulure vert lagon (nacré)		

Service après-vente Spengler : toutes les pièces détachées du stéthoscope sont disponibles auprès de votre distributeur agréé Spengler.

La qualité Spengler

Assurance qualité

Fabrication française certifiée ISO 9001 : 2008, ISO 13485 : 2004.

Marquage CE

Directive européenne CEE 93/42 et sa modification 2007/47 CEE : stéthoscopes : classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler assure la maintenance et la

réparation et forme ses distributeurs agréés à ces services.

Garantie

Garantie légale (art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les stéthoscopes Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

Garantie Spengler de 5 ans du stéthoscope Magister® (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues

défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (embouts auriculaires, membranes et bagues anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.