



Lire attentivement les mises en garde et instructions avant toute utilisation de la chaise. Conserver cette notice.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions hors tout (lpxh) : 57 x 54 x 90 cm
- Largeur entre accoudoirs : 47 cm (manchette : 21 x 5 cm)
- Hauteur sol/accoudoir : 66 cm
- Hauteur sol/assise percée : 48 cm
- Dimensions (lpxh) : coussin assise: 40x 41x 3,5 cm / coussin dossier : 41x 25x 3,5 cm
- Poids : 6.5 kg (avec le seau)
- Châssis en tubes d'acier soudés diam. 22 mm - Peinture époxy gris métal
- Coussins assise et dossier en PVC bleu ciel



POIDS MAXIMUM UTILISATEUR :  = 100 kg

Consignes de sécurité avant d'utiliser la chaise :

- S'assurer que tous les composants de la chaise sont solidement fixés.
- Le sol doit être plan, stable et adhérent.
- L'utilisateur ne doit pas présenter de trouble de l'équilibre et doit pouvoir se tenir assis seul.
- La chaise ne doit pas être utilisée pour supporter des personnes de plus de 100 kg.
- Ne pas se mettre debout sur la chaise.
- Ne pas se tenir en équilibre sur les deux pieds arrière de la chaise.
- Vérifier, avant chaque utilisation, que les coussins d'assise et de dossier sont solidement fixés.
- Ne jamais déplacer la chaise lorsqu'une personne est assise dessus.
- En cas d'exposition prolongée à une source de chaleur, les éléments de sellerie et les accoudoirs peuvent atteindre une température élevée.



Prescription - Installation :

La chaise doit être prescrite par un **professionnel de santé qui s'assurera que les caractéristiques du produit sont corrélées à la pathologie de l'utilisateur.**

La mise en service de la chaise doit être faite par un professionnel de santé compétent qui expliquera au futur utilisateur comment utiliser le produit en toute sécurité, en insistant sur les zones où un risque de pincement existe. L'installateur devra s'assurer que les consignes de sécurité et d'utilisation sont bien comprises.

Utilisation :

- Avant de s'asseoir s'assurer que les pieds de la chaise ne glissent pas sur le sol, se placer dos à la chaise, utiliser les accoudoirs pour se maintenir, puis se placer au-dessus de l'assise et s'asseoir délicatement.
- Pour se relever, utiliser les accoudoirs en les tenant fermement puis se soulever progressivement jusqu'à être debout et en équilibre.
- Pour accéder à l'assise percée, il suffit d'enlever le coussin d'assise en le soulevant à la main.
- Pour enlever ou remettre le seau, il suffit de le tirer ou de le pousser latéralement.

Entretien régulier :

- Nettoyer régulièrement la chaise à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse tiède suivie d'un séchage (ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou à base d'eau de Javel qui risqueraient d'endommager ou de décolorer les éléments de sellerie).
- Vérifier régulièrement l'état des 4 patins et l'efficacité des éléments de serrage, les remplacer dès qu'ils sont dégradés.
- Vérifier la solidité des éléments de sellerie qui ne doivent pas être détériorés, ni présenter de trace d'usure ou de fissure.
- Vérifier régulièrement la stabilité de la chaise, les 4 pieds ne doivent pas être tordus et doivent toucher le sol.
- **Faire vérifier la chaise, au moins une fois par an, par un service technique compétent. Seul un technicien habilité peut procéder à la maintenance et au remplacement de pièces fournies exclusivement par Dupont Médical.**

Conditions de garantie :

La structure mécanique est garantie un an. Cette garantie correspond à un emploi normal de la chaise et exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non-respect des recommandations émises.

La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord de Dupont Médical.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Distributeur : DUPONT MEDICAL - Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP19 - 54390 FROUARD (France)
Tél : 03 83 495 495 - Fax : 03 83 495 496



AILA REHABILITATION EQUIPMENT CO., LTD - No. 971 Fengzhe road,
Taiwang town, Fengxian District, Shanghai, China

drive
DeVilbiss
HEALTHCARE