

	<b>Marque :</b>	
	<b>Classe CE :</b>	I, non stérile
	<b>Durée de vie :</b>	5 ans
	<b>Année de mise sur le marché :</b>	2005 en France
	<b>Code CLADIMED :</b>	M50AA02
	<b>Code CND :</b>	/
	<b>Code GMDN :</b>	10284
	<b>Version :</b>	H
	<b>Date :</b>	27/09/2021

## DONNEES PRODUIT

### Description

Bande textile à allongement court pour bandages compressifs ou de soutien.

### Caractéristiques

- Textile confortable,
- Extensible en un sens (90%),
- Extensibilité maintenue après lavage (10 lavages à 60°C),
- Perméable à l'air,
- Aide à prévenir la formation d'œdèmes,
- Améliore l'hémodynamique veineuse,
- Résiste à la transpiration et aux crèmes,
- Maintien stable,
- Extrémités enduites d'un film protecteur destiné à prévenir l'effilochage,
- Formule sans latex, sans phtalates.

### Composition

Bande : 100% Coton

Enduction fin de bande : Polyuréthane (anti-effilochage)

### Contrôles des matières premières et des produits finis

Effectués par le fabricant.

### Conditionnement / Stérilisation

Boîte unitaire ou contenant 10 ou 24 bandes (24 boîtes unitaires regroupées), avec notice d'utilisation. Produit livré non stérile.

## Références

Présentations en boîtes de 10 ou 24 bandes

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809042252	77187-00	4 cm x 5m	24	24	
4042809101362	45381-00	6 cm x 5m	10	80	
4042809101393	45382-00	8 cm x 5m	10	80	
4042809101423	45383-00	10 cm x 5m	10	80	
4042809101485	45384-00	12 cm x 5m	10	80	

Présentations en boîte unitaire, sans vignette de remboursement

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809101218	01026-00	6 cm x 5m	5	200	
4042809101249	01027-00	8 cm x 5m	5	170	
4042809101270	01028-00	10 cm x 5m	5	140	
4042809101300	01029-00	12 cm x 5m	5	120	

Présentations en boîte unitaire, avec vignette de remboursement

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809101218	01026-10	6 cm x 5m	5	200	1332320
4042809101249	01027-10	8 cm x 5m	5	170	1314887
4042809101270	01028-10	10 cm x 5m	5	140	1319956
4042809101300	01029-10	12 cm x 5m	5	120	1352190

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

## INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS

### Indications

Favorise la fonction de la pompe musculaire entraînant ainsi une amélioration de l'hémodynamique, Favorise la réduction des stases veineuse et lymphatique lors :

- des états variqueux,
- d'une thrombophlébite,
- d'une thrombose veineuse profonde,
- du traitement post-éveinage et post-sclérothérapie,
- d'œdèmes primaires et secondaires,

Apporte un soutien en cas de lésions ligamentaires.

### Contre-indications

Ischémie (ex : affection artérielle occlusive progressive),

Insuffisance cardiaque décompensée,

Phlébite septique,

*Phlegmasia coerulea dolens*,

Allergie à l'un des composants.

## CONSEILS D'UTILISATION

### Mode d'emploi

Il est recommandé que la pose soit réalisée par une personne expérimentée. La pose correcte du produit en circulaire assure une dégressivité continue de la pression, de l'extrémité distale à l'extrémité proximale.

### Précautions d'emploi

Une bande mal appliquée peut entraîner des complications. Dans tous les cas, respecter strictement la prescription médicale. Vigilance chez les patients présentant :

- une infection cutanée,
- une dermatose exsudative,
- une intolérance aux composants de la bande,
- une perte de sensibilité au niveau du membre.

Les attaches jointes ne doivent pas être utilisées sur le patient.

### Particularité d'utilisation

Veiller à ce que les plaies recouvertes par la bande soient protégées par un pansement approprié.

### Accessoires associés

- Pansements absorbants,
- Ouate de rembourrage (Soffban®),
- Jersey tubulaire de protection (Jersey coton),
- Bande de mousse de protection cutanée (Tensoban®),
- Sparadrap tissé acétate ou fibranne avec latex (Adhéropaste® acétate ou fibranne) ou sans latex (Leukoplast® S LF\_support acétate ou Leukoplast® pro LF\_support fibranne).

### Entretien

Lavable en machine à une température maximale de 60°C. Ne pas utiliser d'eau de javel. S'assurer que la bande est parfaitement sèche avant de l'utiliser à nouveau. Ne pas utiliser de sèche-linge. Ne pas repasser.

## INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

### Autorisation de marquage CE

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

### Remboursement

Remboursé en nom de marque par l'assurance maladie, lors de la réalisation d'un bandage multi-type, dans le cadre du traitement de l'ulcère d'origine veineuse ou à composante veineuse prédominante (stade C6 de l'insuffisance veineuse chronique), avec un indice de pression systolique supérieur à 0,8.

### Procédés de destruction

Incinération contrôlée ou mise en décharge, selon la réglementation locale.

Distributeur	Fabricant légal	Mandataire Européen
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matériorvigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN medical Inc. 5825 Carnegie Blvd. Charlotte, NC 28209, USA Site certifié ISO 13485	BSN medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Allemagne Site certifié ISO 13485