

SUPRASORB® A Pro**Compresse/ mèche d'alginate de calcium renforcée**

REF : 33932, 33933, 33934, 33935, 143086, 143087

CLADIMED :

F51BC

PRODUIT :

REF 33932, Suprasorb® A Pro, Compresse d'alginate de calcium renforcée, 5 x 5 cm, référence hôpital et officine

REF 33933, Suprasorb® A Pro, Compresse d'alginate de calcium renforcée, 10 x 10 cm, référence hôpital,

REF 33934, Suprasorb® A Pro, Compresse d'alginate de calcium renforcée, 10 x 20 cm, référence hôpital,

REF 33935, Suprasorb® A Pro, Mèche d'alginate de calcium renforcée, 2 x 45 cm, référence hôpital et officine

REF 143086, Suprasorb® A Pro, Compresse d'alginate de calcium renforcée, 10 x 10 cm, référence officine,

REF 143087, Suprasorb® A Pro, Compresse d'alginate de calcium renforcée, 10 x 20 cm, référence officine.

COMPOSITION :

Les compresses/ mèches d'alginate de calcium renforcé Suprasorb® A Pro sont composées d'un mélange homogène de 20 % de fibres de cellulose et de 80 % de fibres d'alginate de calcium. Les fibres d'alginate sont composées d'environ 60 % d'acide mannuronique et d'environ 40 % d'acide guluronique.

CARACTERISTIQUES :

Les compresses/ mèches d'alginate de calcium renforcées Suprasorb® A Pro sont des pansements doux et souples présentant une forte teneur en acide mannuronique. Les fibres d'alginate de calcium interagissent avec l'exsudat ou le sang, formant un gel qui crée un milieu humide propice à la cicatrisation.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Sous sachet pelable individuel puis sous boîte.

Suprasorb® A Pro, Pansement Alginate de Calcium						
REF	Code GTIN	Code LPPR	Forme	Dimensions	Conditionnement de base	Carton Standard
33932			Compresse	5 x 5 cm	Boîte de 10	120 compresses
33933			Compresse	10 x 10 cm	Boîte de 10	200 compresses
33934			Compresse	10 x 20 cm	Boîte de 5	45 compresses
33935			Mèche	2 x 45 g	Boîte de 5	20 mèches
143086		6320250	Compresse	10 x 10 cm	Boîte de 10	200 compresses
143087		6320243	Compresse	10 x 20 cm	Boîte de 10	90 compresses

Nota :

La forme compresse est utilisée pour les plaies superficielles et la forme mèche pour les plaies profondes.

INDICATIONS :

Traitement des plaies en phase de déterision et de bourgeonnement très exsudatives et/ou infectées :

- d' escarres
- d'ulcères artériels
- d'ulcères veineux de jambe
- d'ulcères diabétiques
- de plaies post-opératoires
- de sites donneurs et de greffes partielles de la peau

MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Vérifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité avant usage.

Application :

- 1- Nettoyer soigneusement la plaie conformément aux standards cliniques actuels, puis sécher le pourtour de la plaie. La peau entourant la plaie doit être propre et sèche.
- 2- Appliquer le en ajustant sa dimension à la taille de la plaie.
- 3- La compresse et la mèche peuvent être découpées à l'aide de ciseaux stériles, si nécessaire.
- 4- Appliquer la compresse sur le lit de la plaie humide. Dans le cas de plaies peu exsudatives, humidifier le pansement à l'aide d'une solution saline physiologique (0,9%)
- 5- Tamponner les plaies profondes à l'aide des mèches d'alginat de calcium renforcé sans tasser,
- 6- Fixer le pansement avec un produit adapté tel que Suprasorb A Pro avec un pansement secondaire adapté.

Changement de pansement :

- 1- Changer le pansement selon les indications du médecin en fonction de l'évolution de la plaie et de son exsudation,
- 2- Sur une plaie soigneusement nettoyée et débarrassée de tous les tissus nécrosés, le pansement doit être changé lorsque de l'exsudat traverse le pansement (pansement saturé). Selon le degré d'exsudation le pansement Suprasorb® A Pro peut rester sur/dans la plaie jusqu'à 7 jours avant d'être remplacé. Le pansement est destiné à être utilisé pendant une période de traitement maximale de 30 jours.
- 3- Enlever le pansement secondaire conformément aux standards cliniques existants.
- 4- Avant de juger de l'état de la plaie et d'appliquer un nouveau pansement, enlever la partie non gélifiée de la compresse/mèche et rincer les résidus de gel dans la plaie à l'aide d'une solution saline physiologique (0,9%).

Usage unique. Ne pas re-stériliser.

CONTRE- INDICATIONS :

Allergie et/ ou hypersensibilité connue à l'un des composants du produit. Plaies sèches.

STERILISATION :

Les Suprasorb® A Pro sont stérilisés par irradiation.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Dans leur emballage d'origine, à une température inférieure à 25°C, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité. Ne pas congeler ou réfrigérer.

VALIDITE DU PRODUIT :

3 ans à partir de la date de stérilisation si les conditions de stockage sont respectées.