



Fiche Technique

TONDEUSE CHIRURGICALE – Référence 9661

Lame tête pivotante – Référence 9660

Lame tête fixe - Référence 9690



CORPS DE LA TONDEUSE, CHARGEUR et LAMES :

- **Dispositif Médical** de Classe 1, non stérile, sans fonction de mesurage
- **Charge initiale** 18 - 24 heures
- **Charges suivantes** 12 - 14 heures
- **Poids de la tondeuse** 190 g
- **Dimensions de la tondeuse** 13,5 cm de longueur / 3,3 cm de diamètre
- **Garantie** 12 mois à partir de la date d'acquisition

	<u>Lame 9690</u>	<u>Lame 9660</u>
■ Autonomie	65 minutes	100 minutes
■ Niveau de bruit	61,0 Db	82,4 Db
■ Régime de coupe	6425 oscillations/mn	6850 oscillations/mn

Batterie

Durée de vie de la batterie (environ 500 heures)
NiMH (Nickel Métal Hydrure)

Lames

	<u>Ref : 9690</u>	<u>Ref : 9660</u>
■ Hauteur	32 mm	20 mm
■ Longueur	50 mm	38 mm
■ Peigne	45 mm	30 mm
■ Dents supérieures	25 dents	24 dents
■ Dents inférieures	28 dents	29 dents
■ Largeur de coupe	4,0 cm	2,8 cm



Fiche Technique

- Marquage CE
- Conforme aux exigences essentielles de la Directive Européenne 93/42/CEE
- Origine Matières Premières USA
- Lieu de fabrication USA
- Site de production certifié ISO 9002

ATTENTION : le numéro se trouvant au pied de la tondeuse ne correspond pas à la date de péremption mais au numéro de lot de fabrication

ENTRETIEN :

- Le corps de la tondeuse n'est pas immergeable, mais peut être rincé sous l'eau courante.
- La désinfection se fait à l'aide d'une compresse imprégnée de solution désinfectante appropriée.
- Ne jamais stériliser le corps de la tondeuse quelque soit la méthode.

INDICATIONS :

Lame 9660

- Tonte sur peau sèche et humide
- Tonte des cheveux

Lame premium 9690

Importante dépilation
Dépilation des poils drus et denses
Tonte des cheveux

CONTRE INDICATIONS : Lame premium 9690

- Plis axillaires
- Plis inguinaux
- Zone génitale

STOCKAGE :

- Il est important de conserver la tondeuse et son chargeur dans un local dépourvu d'humidité.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

- Transformateur - sortie 1,2 V – 0,3 A
- Branchement 230 V CA
- Indicateur de charge Diode verte



Elément appliqué de type B

Double isolation

CONDITIONNEMENT :

- Tondeuse chirurgicale à tête pivotante **Réf - 9661** (1 par boîte)
- Chargeur pour tondeuse chirurgicale 3M à tête pivotante **Réf - 9668** (1 par boîte)
- Lames à usage unique pour tondeuse à tête pivotante **Réf - 9660** (50 par boîte)
- Lames à usage unique **Premium** pour tondeuse à tête pivotante **Réf - 9690** (20 par boîte)

3M France
Marchés de la Santé
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tél.: 01 30 31 82 82
Fax : 01 30 31 85 65