

# exeol surf optimal

Détergent désinfectant sans alcool pour surfaces et dispositifs médicaux

Solution prête à l'emploi:

► **Application dispositif médical:** pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces des

dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs.

► **Application produit biocide:** pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces, du mobilier et des équipements lourds.


Avant toute utilisation, vérifier la date de péremption figurant sur l'étiquette.

⚠ **exeol surf optimal** s'utilise non dilué.




SURFACES


Flacon 750 mL spray

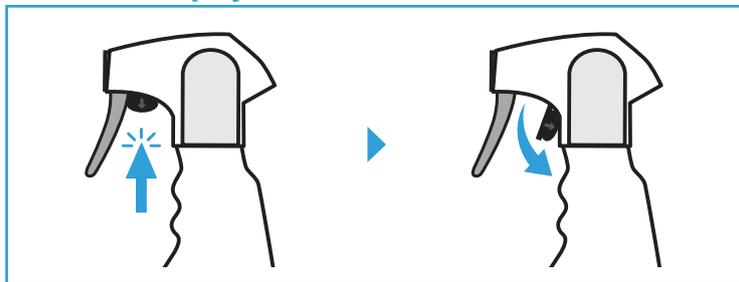


**1** Lors de la première utilisation, détacher la protection d'inviolabilité de la buse. Déverrouiller la sécurité du spray.

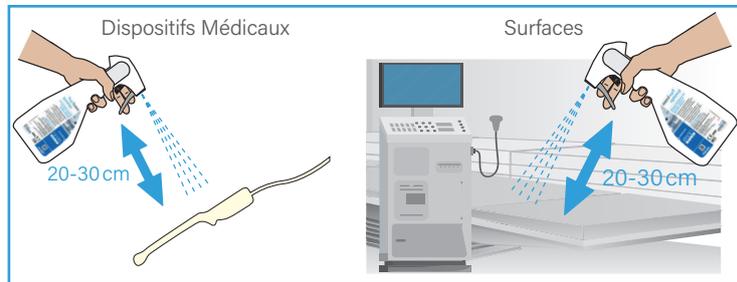

**2** Pulvériser uniformément sur la surface de manière à bien couvrir la zone à traiter ( $\pm 6 \text{ mL/m}^2$ , à 20-30 cm de la surface).

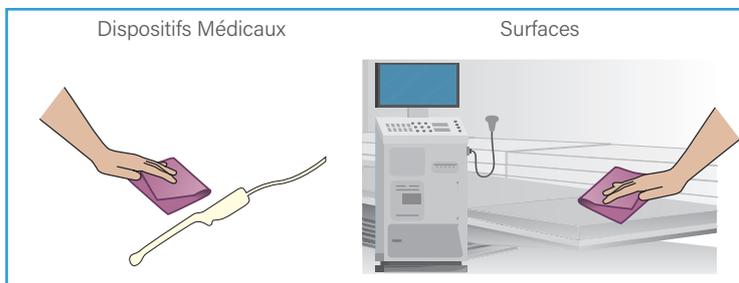


**3** Nettoyer la surface par essuyage.

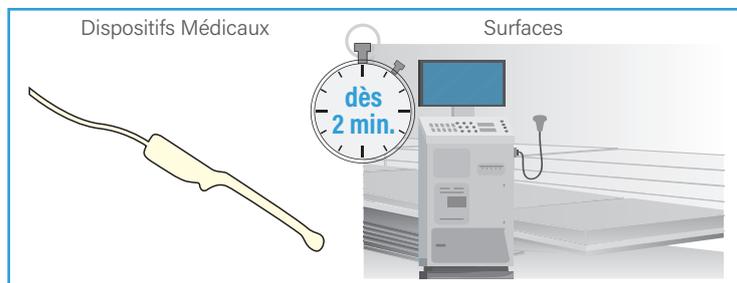

**4** Temps de contact : dès 2 min. selon le spectre d'activité recherché. Après le temps de contact approprié, laisser sécher ou essuyer avec une lingette sèche.



**5** Ne pas rincer (\*excepté les surfaces en contact direct avec la peau, les muqueuses, les denrées alimentaires ou si une étape de désinfection consécutive est requise).

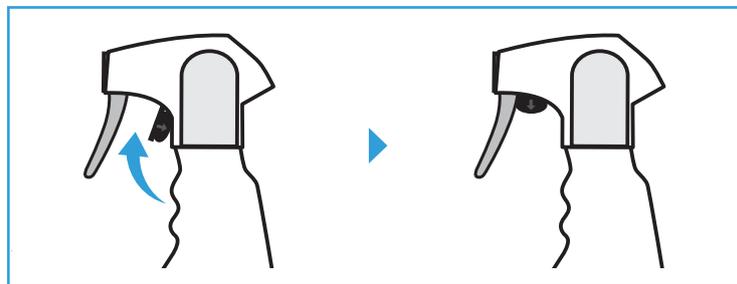

**6** Verrouiller la sécurité après utilisation.

Répéter l'opération de désinfection chaque fois que nécessaire.

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANTÉ  
**exeol**

UNE DIVISION SODEL

Utilisez les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Dossier produit disponible sur [www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)

Sodel  
190 rue René Barthélemy  
14100 Lisieux, France.  
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50  
[www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)

Marquage CE obtenu en 2023  
DM classe IIa

CE 0459

